



Mode d'emploi du Mannequin Bébé Choking

Mannequin d'apprentissage de la manœuvre de désobstruction des voies aériennes chez le bébé.

1. Présentation

Le mannequin Bébé Choking est un mannequin de formation et d'entraînement permettant de simuler avec justesse et réalisme la manœuvre de Heimlich destinée à la désobstruction des voies aériennes chez un bébé.

Chaque mannequin est conçu dans un PVC robuste.

2. Utilisation

La mise en oeuvre du mannequin se fait en sélectionnant le corps étrangers.

Le bébé est placé à plat ventre sur le bras du sauveteur, tête en déclive ; les tapes lui sont administrées entre les omoplates.

3. Entretien et nettoyage

Le mannequin étant conçu pour l'apprentissage de la manœuvre de désobstruction des voies aériennes, seule la surface extérieure devra être nettoyée.

La tête et le corps être nettoyés à l'eau chaude savonneuse. Rincer et essuyer le mannequin avec précaution.

4. Caractéristiques techniques

Poids du mannequin avec sac de transport : 1,8 kg

Dimensions : 80 x 30 x 20 cm

Matériau du mannequin : PVC

Matériaux des corps étrangers : coton + PVC

5. Références

Mannequin Bébé Choking – Référence 901 001 640

Compléter votre gamme avec les références des mannequins Choking

6. Contacts

Ambu Sarl

Les bureaux du Parc
Av Jean Gabriel Domergue

33 070 Bordeaux Cedex

Tél : 05 57 92 31 50

Fax : 05 57 92 31 59

www.ambu.com