



Mode d'emploi du mannequin Sani-Baby

1 - Présentation

Sani-Baby est un mannequin de formation et d'entraînement simulant avec réalisme et justesse les conditions anatomiques rencontrées lors du bouche-à-bouche-et-nez et de la Réanimation Cardio-Pulmonaire (compressions thoraciques et insufflations) chez un nourrisson. Sa présentation permet au formateur d'insister sur sa configuration anatomique spécifique justifiant des gestes de secours différents de ceux pratiqués sur l'adulte. Il permet au participant à la formation de mettre en oeuvre une RCP chez un nourrisson.

Sani-Baby présente un système hygiénique unique. Chaque intervenant sur le mannequin dispose de son propre sac d'insufflation servant également de peau de visage.

2 - Utilisation

La conception du mannequin Sani-Baby est conforme aux dernières recommandations relatives à la formation aux Premiers Secours.

Le massage cardiaque externe peut être pratiqué selon les normes en vigueur.

Le mouvement du thorax est clairement visible lors de l'insufflation et de l'expiration. Il n'y a aucun risque de contamination croisée grâce au principe du sac d'insufflation individuel.

Avant de procéder à toute insufflation, insérer un sac d'insufflation dans la bouche du mannequin.

3 - Nettoyage et désinfection

Sac d'insufflation

Chaque stagiaire dispose de son propre sac d'insufflation à usage unique qui doit toujours être jeté après l'entraînement.

Nettoyage du crâne, du cou, du corps, des bras et des jambes

Ces éléments doivent être essuyés avec un tissu imbibé de détergent doux puis essuyés avec un tissu imbibé d'eau claire. Le mannequin ne doit pas être immergé dans l'eau.

Les marques de rouge à lèvres ou de stylo à bille peuvent pénétrer dans le matériau et doivent donc être retirées le plus rapidement possible avec de l'alcool.

4 - Caractéristiques techniques

Poids	:	0,980 kg
Longueur totale du mannequin	:	52 cm
Matériau du corps et de la tête	:	PVC souple/semi-souple
Matériau du sac d'insufflation	:	polyéthylène

5 – Références

Mannequin Sani-Baby	:	901 002 121
Jeu de 100 sacs d'insufflation	:	901 002 125 – Sac de transport : 901 002 260

6 - Renseignements et contacts

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc
Av Jean Gabriel Domergue
33 000 Bordeaux

Tél. : 05 57 92 31 50

Fax : 05 57 92 31 59

www.ambu.fr