



Tampon de mousse à Biopsie

Utilisation	Pour Diagnostic In-Vitro (Directive Européenne 98/79/EC - IVDD - du 27 Octobre 1998). Les tampons de mousse à biopsie sont conçus pour le maintien des biopsies de tissus en place.
Produit	Tampon de mousse à biopsie de tissus (bleu ou noir). Fournis en sachet – chacun contenant 500 ou 1000 mousses.
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> • Usage Unique - Ne pas réutiliser. • Pour usage professionnel par des personnels habilités.
Conseils de Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver dans l'emballage d'origine, dans un environnement sec en protégeant de préférence des sources de chaleur et lumière. • Conserver à température ambiante -Température de conservation conseillée entre 2°C et 30°C. • Éviter les grandes variations de température pendant le stockage • Ne pas utiliser après la date d'expiration • La péremption est indiquée par la date limite d'utilisation imprimée sur la boîte. • Il n'y a aucun signe apparent qui suggère une instabilité ou une diminution des performances du produit. Si des performances anormales sont observées sans raison apparente et ne peuvent pas être attribuées aux variations des procédures dans le laboratoire, merci de contacter votre représentant local Trajan. • Les tampons de mousse à biopsie résistent à des températures de -40°C à 121°C, et sont auto-clavables.
Usage	<ul style="list-style-type: none"> • Les tampons de mousse à biopsie Trajan sont prêts à l'emploi. • Pour éviter les interférences il est conseillé d'humidifier les mousses de biopsie avec le fixateur avant usage. • Des échantillons de biopsie sont placés entre deux tampons de mousse à biopsie et sont positionnés dans une cassette pour tissus avec des parois en métal ou en plastique. • Les tampons de mousse évitent aux tissus d'être perdus pendant les manipulations. • Pour extraire les tissus en fin de processus, ouvrir délicatement la cassette, extraire le tissu cependant que les tampons de mousse sont enlevés délicatement.
Compatibilité	Les tampons de mousse à biopsie Trajan sont compatibles avec la plupart des cassettes à tissus employées en laboratoire d'histologie.
Certificat de conformité	 
Conformité des produits	Trajan sélectionne des fournisseurs qui mettent en œuvre un système d'assurance qualité et qui sont indépendamment certifiés ISO9001.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (longueur x largeur)	31 mm x 26 mm
Epaisseur	2.5 mm
Matière	100% Polyester uréthane réticulé

Pour plus d'informations sur ce produit visiter www.trajanscimed.com ou contacter techsupport@trajanscimed.com

Australie et Nouvelle Zélande

Trajan Scientific Australia Pty Ltd
7 Argent Place, Ringwood
Victoria 3134, Australia
Toll Free: 1800 257 213
Tel Melbourne: +61 (0) 3 9874 8577
Tel Sydney: +61 (0) 2 9609 1755
Fax: +61 (0) 2 9609 1411
anz@trajanscimed.com

Amériques

Trajan Scientific Americas Inc
Wells Branch Tech Center - Austin TX
1421 W Wells Branch Pkwy # 108
Pflugerville, Texas 78660, USA
Toll Free: 800 945 6154
Tel: 512 837 7190
Fax: 512 836 9159
usa@trajanscimed.com

Europe, Moyen Orient, Afrique et Inde

Trajan Scientific Europe Ltd
Crownhill Business Centre
14 Vincent Avenue
Crownhill, Milton Keynes
MK8 0AB, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1908 568 844
Fax: +44 (0) 1908 566 790
europe@trajanscimed.com

Asie

Trajan Scientific Japan Inc
RK CUBE 3F, 6-85 Otamachi
Naka-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 231-0011, Japan
Tel: +81 (0) 45 222 2885
Fax: +81 (0) 45 222 2887
japan@trajanscimed.com