

## **Bradley Products Inc. Davidson Marking System® Tissue Dyes – Notice d'utilisation.**

Davidson Marking System® Tissue Dyes sont des colorants indélébiles pour le repérage des pièces chirurgicales :

- Ils permettent une orientation et un repérage précis des différentes zones de l'échantillon.
- Ils sont utilisables sur des tissus frais ou fixés au formol.
- Ils permettent regroupement de plusieurs prélèvements dans une cassette unique.

### **Mode d'emploi :**

Le tissu doit être épongé pour éliminer l'excès de liquide de la surface avant d'appliquer le colorant. Les colorants peuvent être appliqués en utilisant des bâtonnets en bois ou des cotons-tiges. Laisser sécher complètement. Le marquage sera permanent 1-2 minutes après l'application. La dissection de l'échantillon peut alors être effectuée.

**Avertissement :** Ne pas utiliser ces colorants in vivo (patient, animal...). Utiliser uniquement sur des tissus excisés. Les colorants provoqueront une coloration permanente.

### **References du Produit :**

**CE** IVD 000577

#### **Flacons Individuels de 237 ml :**

| Couleur     | Flacon | Ref    |
|-------------|--------|--------|
| Vert        | 237 ml | 3408-1 |
| Jaune       | 237 ml | 3408-2 |
| Noir        | 237 ml | 3408-3 |
| Rouge       | 237 m. | 3408-4 |
| Bleu        | 237 ml | 3408-5 |
| Orange      | 237 ml | 3408-6 |
| Violet      | 237 ml | 3408-7 |
| Citron Vert | 237 ml | 3408-8 |

#### **Flacons Individuels de 59 ml :**

| Couleur     | Flacon | Ref    |
|-------------|--------|--------|
| Vert        | 59 ml  | 1163-1 |
| Jaune       | 59 ml  | 1163-2 |
| Noir        | 59 ml  | 1163-3 |
| Rouge       | 59 ml  | 1163-4 |
| Bleu        | 59 ml  | 1163-5 |
| Orange      | 59 ml  | 1163-6 |
| Violet      | 59 ml  | 1163-7 |
| Citron Vert | 59 ml  | 1163-8 |

**Boîte de 40 flacons de 3ml de même couleur :**

| Couleurs    | Flacons | Cdt | Ref    |
|-------------|---------|-----|--------|
| Vert        | 3ml     | 40  | 1013-1 |
| Jaune       | 3ml     | 40  | 1013-2 |
| Noir        | 3ml     | 40  | 1013-3 |
| Rouge       | 3ml     | 40  | 1013-4 |
| Bleu        | 3ml     | 40  | 1013-5 |
| Orange      | 3ml     | 40  | 1013-6 |
| Violet      | 3ml     | 40  | 1013-7 |
| Citron Vert | 3ml     | 40  | 1013-8 |

**Kits comprenant diverses couleurs en flacons avec présentoir et 50 bâtonnets applicateurs) :**

| Kit  | Cdt   | Ref      |
|--|-------|----------|
| 7 flacons de 59ml<br>(vert, jaune, noir, rouge, bleu, orange, violet)                  | Unité | 2407     |
| 5 flacons de 59ml<br>(vert, jaune, noir, rouge, bleu)                                  | Unité | 2401     |
| 3 flacons de 59ml<br>(vert, noir, bleu)  | Unité | 2403-BVN |
| 3 flacons de 3ml de chaque couleur<br>(vert, jaune, noir, rouge, bleu, orange, violet) | Unité | 1007-P   |

**Petit Matériel dédié :**

| Produit  | Cdt     | Ref  |
|--|---------|------|
| Bâtonnets applicateurs en bois                       | 20 x 50 | 8553 |
| Bouchons pinceaux, pour flacons de 59 ml             | x 10    | 8554 |
| Applicateurs type coton-tige (tige en bois de 15 cm) | x 250   | 8556 |

**Distributeur en France:**

MM France  
Parc des Vallières  
51 rue de l'industrie  
Brignais, 69530 FRANCE  
Tel : 07 6918112  
[www.mm-france.fr](http://www.mm-france.fr)