

# FICHE TECHNIQUE

## Milieu de Montage

**Référence :** U/00840

**Désignation :** Pertex

**Description :** Milieu de montage classique pour montage manuel ou en colleuse de lamelles



### 1- CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pertex est un milieu de montage à séchage rapide permettant la préservation des échantillons.

L'utilisation du milieu de montage Pertex n'affecte pas la forme, la structure ou la couleur de l'échantillon monté, même après des années de stockage. Il s'agit d'un milieu de montage à séchage rapide à base de Xylène, permettant la lecture immédiate des lames.

Il suffit d'une fine couche de Pertex pour que la lamelle adhère à une lame de microscope.

### 2- UTILISATION DU PRODUIT

Déposer quelques gouttes de PERTEX sur l'échantillon, appliquer la lame, laissez sécher quelques minutes avant l'observation.

Pour une utilisation en colleuse (toute marque) mettre le milieu de montage PERTEX dans le réservoir prévu à cet effet. Suivre les consignes du fabricant pour la distribution du milieu.

### 3- REFERENCES DU PRODUIT

REFERENCE	CDT	DESCRIPTIF
U/00840	5 X 40 ml	Milieu de montage classique pour montage manuel ou en colleuse de lamelles

