





## Recommandations d'utilisation


# Lancette BD Microtainer® Contact violette pour glycémie capillaire

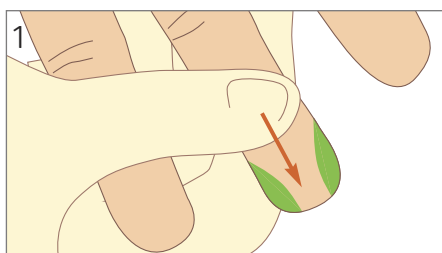


1 Identifier et nettoyer le site de prélèvement selon la procédure en vigueur.  
Le réchauffer par un massage léger depuis la paume vers le point de ponction, tout en maintenant la main du patient vers le bas.

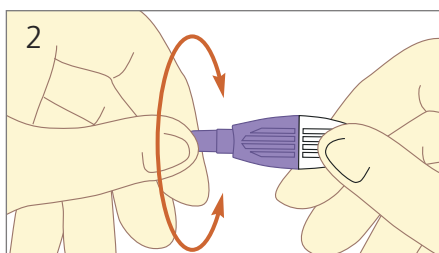


2 Saisir l'embout protecteur et le retirer en effectuant un mouvement circulaire.

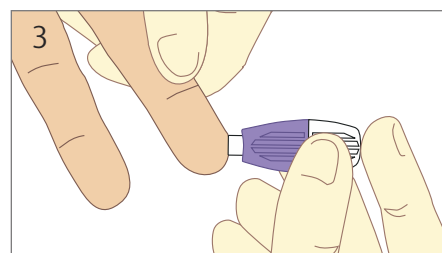


3 Positionner la lancette sur le site de prélèvement.

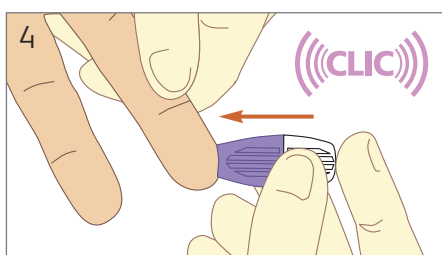

4 Exercer une pression ferme.  
Un clic sonore confirme l'activation automatique de la lancette.

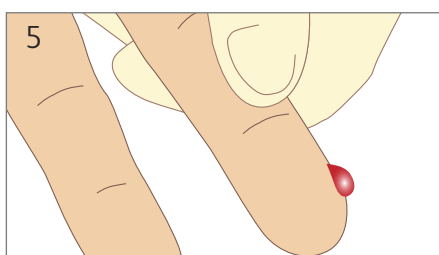

5 Recueillir l'échantillon selon la procédure en vigueur.  
Eventuellement, exercer une légère pression afin d'obtenir une goutte satisfaisante.

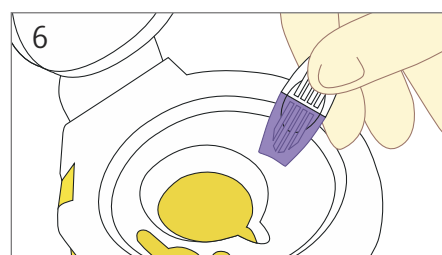

6 Eliminer la lancette dans un collecteur adapté pour objets piquants, coupants, tranchants.



Une simple pression sur la peau déclenche la double action ponction / rétraction de l'aiguille.

Réf	Descriptif	Conditionnement
366592	Lancette avec aiguille 30 G (0.31 mm) Profondeur 1,5 mm	200 unités / boîte - 2000 unités / carton