


Recommandations d'utilisation

Bouton poussoir servant à dépiquer l'aiguille

Retrait automatique de l'aiguille de la veine, technologie par bouton poussoir




Unité de prélèvement à ailettes Sécurité BD Vacutainer® Push Button

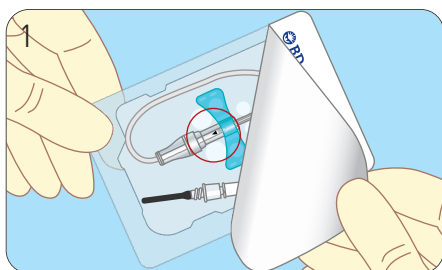


Attention, à l'ouverture de l'emballage, saisir le dispositif par son embase pour ne pas risquer l'activation du mécanisme de rétraction de l'aiguille, en appuyant involontairement sur le bouton avec le triangle noir.


Visser le corps de prélèvement sur l'adaptateur et s'assurer que celui-ci est bien emboîté dans l'embase blanche.

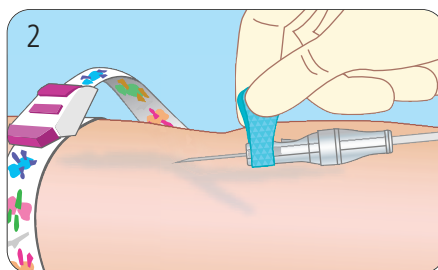

Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille en le faisant tourner puis en le tirant. Maintenir l'unité à prélèvement par les ailettes, entre le pouce et l'index, afin d'introduire l'aiguille dans la veine.

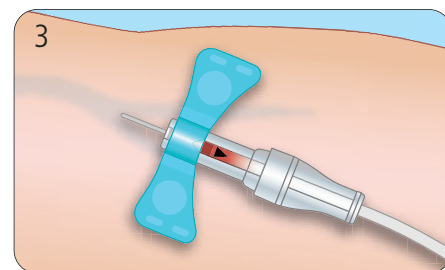


Une fois l'aiguille dans la veine, le reflux sanguin est immédiatement visible au niveau de l'embase du dispositif, à l'arrière des ailettes.

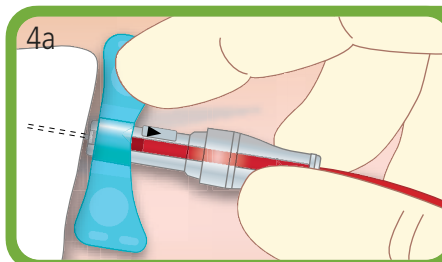


Ne pas dépiquer l'aiguille de la veine.

Placer une compresse au dessus de l'aiguille, en la maintenant latéralement, sans exercer de pression.

Faire en sorte qu'elle recouvre la partie avant du dispositif. Maintenir le dispositif par l'embase entre le pouce et le majeur.

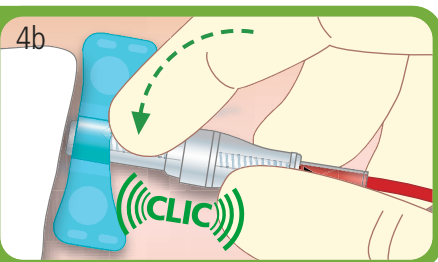

Avec l'index, appuyer sur le bouton poussoir (triangle noir) afin d'activer **automatiquement** le retrait de l'aiguille de la veine. Un "clic" sonore confirme le retrait et la neutralisation de l'aiguille. Comprimer le point de ponction avec la compresse.

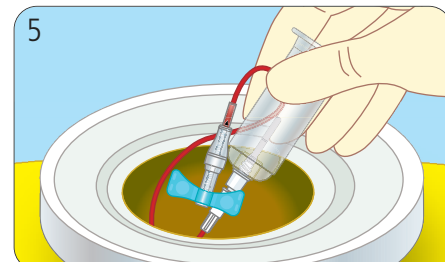

Vérifier que l'aiguille est entièrement rétractée et neutralisée. Eliminer l'ensemble du système dans un collecteur adapté pour objets piquants, coupants, tranchants.

Réf	Descriptif	Couleur	Tubulure	Conditionnement
367338	19 mm x 8/10 - 21G		178 mm	200 (4 x 50)
367336	19 mm x 6/10 - 23G		178 mm	200 (4 x 50)

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

11, rue Aristide-Bergès, Z.I. des Iles - BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix Cedex - Tél. 04 76 68 36 36 - www.bd.com/fr/pas - email : vacutainerfr@bd.com.

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros. BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ©2015 BD - ME_UnitePushButton_03/15 - AB•Com

Unité à ailettes sécurité BD Vacutainer® Push Button, stérile, à usage unique, pour prélèvement de sang veineux, activation par bouton poussoir. Dispositif médical classe IIa (directive 93/42/CE), CE 0050. Mandataire UE : BD Plymouth, UK.

Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Pris en charge par l'assurance maladie.



Pour que chacun
vive en bonne santé