

BD, votre partenaire sécurité

Conçu pour  
son **confort**  
et sa **sécurité**.



**BD Quikheel™**

Dispositif sécurité d'incision  
pour le prélèvement capillaire



Pour que chacun  
vive en bonne santé

## Prélèvement au **talon** du **nouveau-né**



### BD Quikheel™


## Dispositif sécurité d'incision pour le prélèvement capillaire

#### Confort et sécurité du nouveau-né

- Réduit la douleur par rapport à un dispositif de ponction.<sup>1</sup>
- Profondeur d'incision réduite : 1mm ou 0,85mm selon le poids du nouveau-né.<sup>2</sup>
- Recueil de sang plus rapide par rapport à un dispositif de ponction.<sup>1</sup>
- Dispositif BD Quikheel™ validé pour les tests de dépistage néonatal.<sup>1,3</sup>

#### Praticabilité et sécurité pour l'utilisateur


- Forme étroite et arrondie du dispositif pour une bonne visibilité du site de prélèvement et une préhension aisée pour droitier ou gaucher.
- Neutralisation de la lame dès l'incision par un verrouillage irréversible et confirmé par un clic sonore.

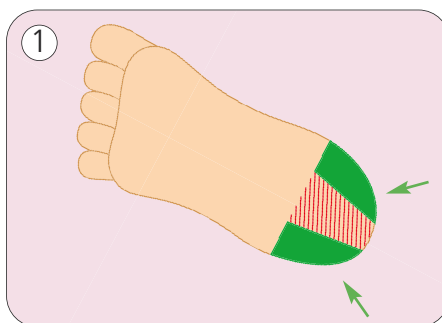


Sélectionner le site de prélèvement (en vert sur le schéma), le réchauffer et le désinfecter selon la procédure de l'établissement. Laisser sécher à l'air libre.



Positionner le dispositif **parallèlement** ou **perpendiculairement** à l'axe du pied, en le tenant entre le pouce et le majeur, la mention Quikheel™ face à soi.

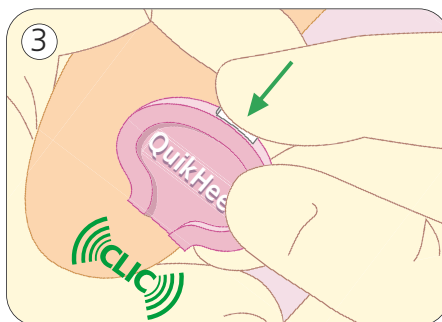

Maintenir fermement le dispositif et enfoncer le bouton-poussoir. Un clic se fait entendre, l'incision s'effectue et la lame se rétracte automatiquement. Eliminer le dispositif dans un container adapté.

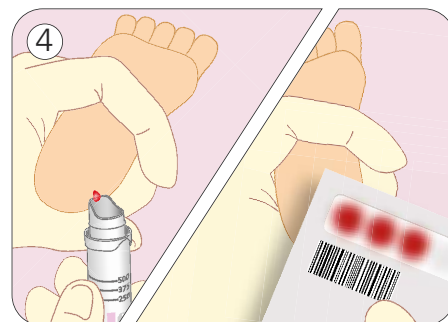

Essuyer la première goutte avec une compresse stérile puis réaliser le recueil de la manière appropriée : tubes BD Microtainer® ou test de dépistage néonatal.

1. V. Shah & al. Evaluation of a new lancet device (BD Quikheel™) on pain response and success of procedure in term neonates. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003; 157:1075-1078, Comparateur : Lancette BD Safety-Flow.

2. OPTMQ (Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec). Prélèvement de sang par ponction capillaire aux fins d'analyse, Règles de pratique, 3ème édition. 2011. §14.1

3. J.L. Dondt & al. Evaluation du dispositif BD Quikheel™ pour le prélèvement capillaire chez le nouveau-né. Ann Biol Clin. 2001; 59:647-50

Réf	Descriptif	Incision (prof x largeur)	Couleur
368102	Dispositif pour nouveaux-nés "petit poids"	0,85 x 1,75 mm	
368103	Dispositif pour nouveaux-nés "poids normaux"	1 x 2,5 mm	