


Besoin d'une goutte de sang ?



Lancettes BD SENTRY™

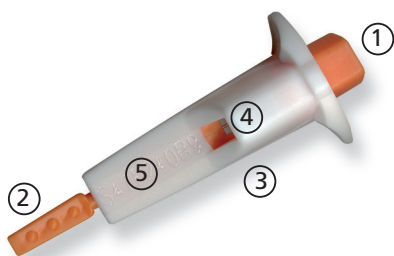

Simplicité

- Activation par bouton poussoir ①
- Capuchon protecteur de l'aiguille ②

Ergonomie


- Maintien optimal de la lancette
- Forme en V pour une meilleure visibilité du site de ponction ③

Sécurité


- Usage unique
- Mise en sécurité automatique ④ et irréversible de l'aiguille après la ponction

Traçabilité


- Numéro de lot gravé sur chaque lancette ⑤

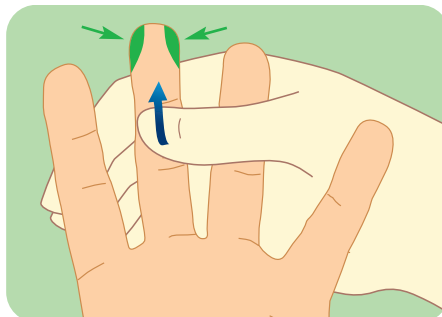


1. Nettoyer la zone de prélèvement et la réchauffer par un massage léger.

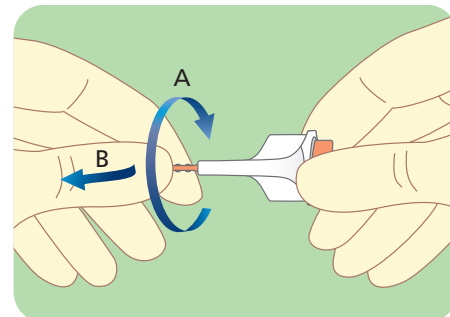

2. Ôter le capuchon protecteur en tournant (A) puis en tirant (B).

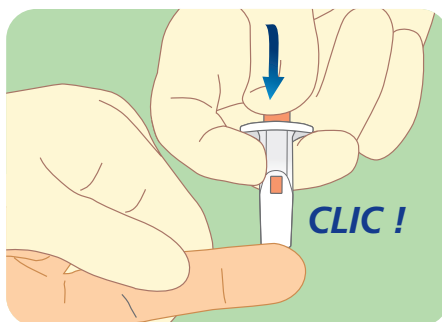

3. Positionner la lancette sur le site de prélèvement et presser le bouton-poussoir. Un "clac" se fait entendre, la ponction s'effectue et l'aiguille se rétracte automatiquement.

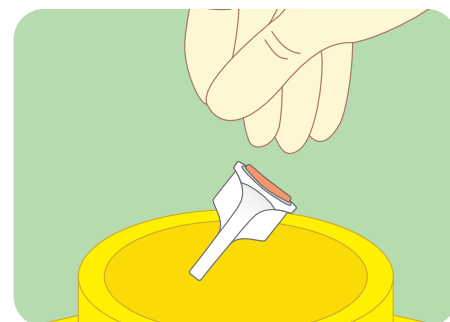

4. Eliminer la lancette dans un container adapté.

Réf	Descriptif	Couleur
369528	Lancette avec aiguille 1,5 mm x 28 G (0.36 mm)	
369523	Lancette avec aiguille 1,8 mm x 23 G (0.63 mm)	