


## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 17.2113120**

Fiche créée le : 19/10/2012

Dernière modification le : 03/10/2018

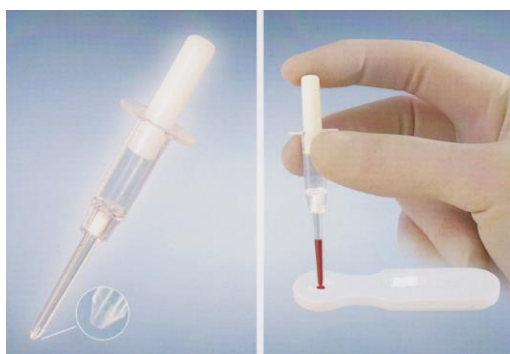

**Désignation commerciale :** Minivette® POCT 20µl, bouton violet, additif EDTA K3

**Application :** Prélèvement de sang capillaire pour tests POCT

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Normes et Directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79/CE

**Matière :** Bouton piston rouge en polyéthylène (PE)  
Corps en Acétate de cellulose  
Filtre en Polyéthylène hydrophobe

**Dimensions :**

Longueur totale avant usage	66mm
Longueur du capillaire avant filtre	25mm
Volume de prélèvement	20µl +/-5%

**Additif :** EDTA K3



**Art N°: 17.2113120**

**Conditionnement :** Carton de 10 boîtes de 200 unités soit 2000


**Qualité biologique :** Non stérile

**Numéro de lot :** Indication sur carton et boîte

**Date limite d'utilisation :** 36 mois en sortie de production  
Indication sur carton et boîte

## Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :


Usage unique  
Stocker à température ambiante

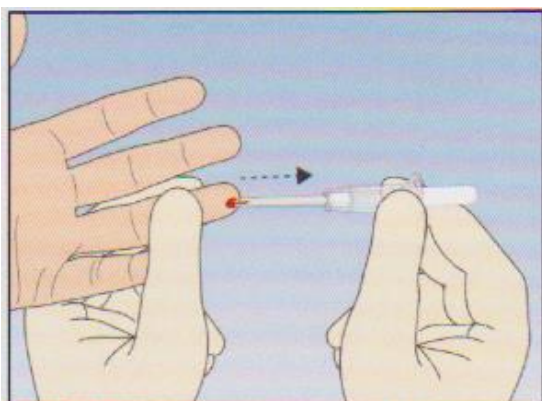

La Minivette® POCT garantit la réussite du prélèvement.


Tenir la Minivette® POCT de chaque côté sous les ailettes, à l'horizontal ou en position légèrement inclinée.

Attention : l'orifice de ventilation placé à l'extrémité supérieure du piston doit rester ouvert durant le prélèvement pour garantir l'effet capillaire.

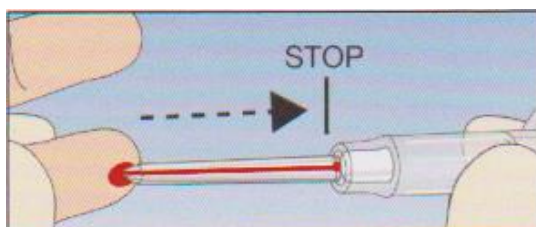

Le prélèvement s'arrête automatiquement lorsque le sang présent dans le capillaire atteint le filtre blanc.

Ce filtre empêche toute « fuite » accidentelle lors du transfert vers le support d'analyse par exemple.

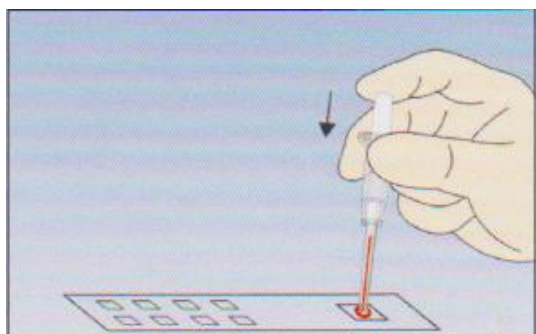


L'échantillon de sang total peut être distribué avec précision en appuyant sur le piston.

Placer la pointe du capillaire sur le support d'analyse pour y répartir l'échantillon.



**Art N°: 17.2113120**

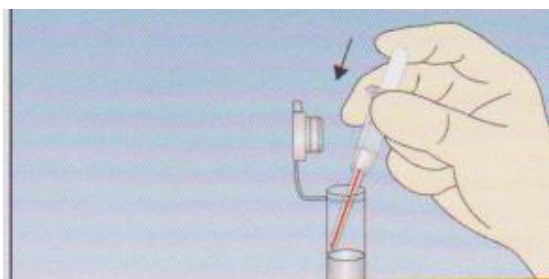

L'échantillon peut également être transféré dans un microtube.

Éliminer la Minivette® POCT dans un container conforme à la réglementation en vigueur (DASRI)