

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 85.1441200

Fiche créée le: 12/12/2006

Dernière modification le : 23/10/2018



Désignation commerciale : Aiguille de sécurité pour S-Monovette®
25mm x 0.7mm – 22G – Code couleur noir

Application : Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette®

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : Aiguille pour prélèvement sanguin veineux
avec dispositif de sécurité pour protéger
l'utilisateur en fin de prélèvement.

Normes et Directives : Dispositif Médical conforme à la Directive
93/42CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0124

Dimensions : Longueur 25mm – 1"inch
Diamètre 0.7mm – 22G gauge

Conditionnement : Carton de 10 boîtes de 50 aiguilles en
emballage unitaire, soit 500 pièces



Art N°: 85.1441200

Qualité bactériologique :	Stérile par irradiation
Numéro de lot :	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Date limite d'utilisation	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton Durée de vie = 36 mois en sortie de production

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à Usage unique.

Absence de latex.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.

Éliminer après usage en utilisant des containers adaptés conforme à la législation en vigueur.

Ne jamais re-capuchonner une aiguille.

Recommandations de stockage : Fourchette de température 0°C – 24°C, à l'abri de l'humidité et des rayons ultra-violets

Mode d'emploi – Aiguille de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®

Préparer la zone de la peau pour une piqûre intraveineuse selon le protocole de l'établissement en utilisant la technique antiseptique appropriée.

Déchirer l'emballage à l'endroit de la flèche jusqu'à ce que le manchon de guidage apparaisse et retirer entièrement l'aiguille. Ne pas enlever le fourreau de l'aiguille avant usage. Effectuer la piqûre intraveineuse (biseau de l'aiguille tourné vers le haut, système de sécurité côté droit) et procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine (1). Placer le système de sécurité sur une surface stable et plane et presser doucement l'aiguille vers le bas jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le système de sécurité en faisant un « clic » audible (2).



Art N°: 85.1441200

ATTENTION : sans ce « clic » audible, le système de sécurité n'est pas activé et ne peut pas remplir sa fonction de protection.

Jeter l'aiguille ainsi protégée dans un container à objets tranchants (3). S'assurer de bien garder les mains derrière l'embout de l'aiguille pendant tout le temps de la procédure. Ne pas tenter de manipuler ou de retirer le mécanisme de sécurité.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'aiguille provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser d'aiguille courbée, endommagée ou ayant déjà servi. Porter des gants.

Aiguille de sécurité

Consignes de manipulation



Après le prélèvement sanguin

Déconnectez la dernière S-Monovette® de l'aiguille de sécurité, puis retirez l'aiguille de sécurité de la veine.



Saisissez l'adaptateur de l'aiguille de sécurité, appliquez le protecteur d'aiguille sur une surface stable et plane et appuyez avec précaution l'aiguille vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez et ressentiez un déclic qui correspond à l'enclenchement de l'aiguille de sécurité dans le protecteur d'aiguille.



Vous pouvez aussi activer le protecteur d'aiguille à l'aide de votre index à titre d'alternative à l'ill. 2a.

Afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité, veuillez veiller à activer le protecteur d'aiguille à sa base.



Après l'activation du mécanisme de protection

Éliminez l'aiguille de sécurité protégée dans une boîte à déchets.