

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 85.1642205**

Fiche créée le: 26/02/2008

Dernière modification le : 23/10/2018



photo informative non contractuelle

**Désignation commerciale :** Épicrânienne de sécurité courte Multifly  
19mm x 0.5mm 25G – Code couleur orange  
avec adaptateur pour S-Monovette®

**Application :** Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Épicrânienne version courte pour  
prélèvement sanguin veineux avec dispositif  
de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin  
de prélèvement et adaptateur pour S-  
Monovette®

**Normes et Directives :** Dispositif Médical conforme à la Directive  
93/42CE  
Classe IIa  
Organisme notifié : 0124

**Dimensions :** Longueur 19mm – 3/4"inch  
Diamètre 0.5mm – 25G gauge  
Tubulure 80 mm - Volume mort <120µl

**Conditionnement :** Carton de 4 boîtes de 100 épicrâniennes en  
emballage unitaire, soit 400 pièces

**Qualité bactériologique :** Stérile par oxyde éthylène



**Art N°: 85.1642205**

**Numéro de lot :**

Sur chaque emballage individuel, boîte et carton

**Date limite d'utilisation**

Sur chaque emballage individuel, boîte et carton  
Durée de vie = 36 mois en sortie de production

**Mode d'emploi – Limites d'utilisation – Recommandations :**

Article à Usage unique. Absence de latex  
Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.  
Eliminer après usage en utilisant des containers adaptés conforme à la législation en vigueur.  
Stocker à température ambiante.

**Mode d'emploi – Épicrânienne de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®**

Préparer la zone de la peau pour une piqûre intraveineuse selon le protocole de l'établissement en utilisant la technique antiseptique appropriée.  
Déchirer l'emballage à l'endroit de la flèche et prendre l'aiguille Safety-Multifly®.  
Procéder à la ponction en saisissant les ailettes de l'aiguille Safety-Multifly®.  
Procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'adaptateur de la Safety-Multifly®. Tenir l'aiguille Safety-Multifly® par la partie arrière du protecteur d'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine.

Tout en tenant la tubulure de la Safety-Multifly® avec votre autre main, pousser le protecteur d'aiguille jusqu'à ce que celui-ci couvre l'ensemble de la longueur de l'aiguille. L'aiguille peut être clairement vue et ressentie au verrouillage dans sa position de sécurité.

Jeter l'aiguille ainsi protégée dans un container à objets tranchants (3). S'assurer de bien garder les mains derrière l'embout de l'aiguille pendant tout le temps de la procédure. Ne pas tenter de manipuler ou de retirer le mécanisme de sécurité.

**ATTENTION :** Ne pas utiliser d'épicrânienne provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.

