

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 85.925

Fiche créée le: 21/02/2012

Dernière modification le : 23/10/2018



Désignation commerciale : Micro - Aiguille pour prélèvement sanguin veineux
18mm x 0.5mm – 25G –
Code couleur orange

Application : Prélèvement sanguin veineux en néonatalogie et pédiatrie.

Fabricant : SARSTEDT AG & Co KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : Aiguille pour prélèvement sanguin veineux en néonatalogie et pédiatrie en emballage unitaire stérile

Normes et Directives : Dispositif Médical conforme à la Directive 93/42CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0197

Dimensions :

Longueur aiguille	18mm
Diamètre	0.5mm – 25G
Longueur totale	36mm

Conditionnement : Carton de 10 boîtes de 50 aiguilles en emballage unitaire, soit 500 pièces



Art N°: 85.925

Qualité bactériologique :	Stérile par irradiation
Numéro de lot :	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Date limite d'utilisation	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton Durée de vie = 36 mois en sortie de production

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à Usage unique.

Absence de latex

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.


Eliminer après usage en utilisant des containers adaptés conforme à la législation en vigueur.

Ne jamais recapuchonner une aiguille.


Stocker à température ambiante.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'aiguille provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser d'aiguille courbée, endommagée ou ayant déjà servi. Porter des gants.

MODE D'EMPLOI AIGUILLE NEONATALE

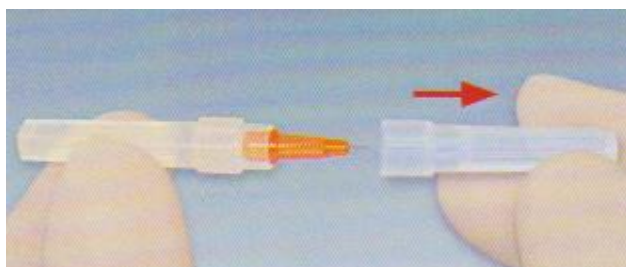

Enlever la cape en tirant ou en t tournant

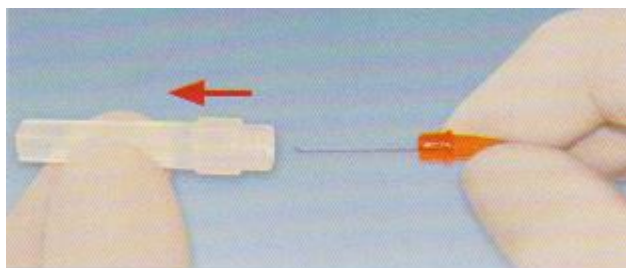


Retirer l'aiguille néonatale de l'embout protecteur.



Art N°: 85.925



Piquer la veine et laisser couler le sang dans un microtube pour prélèvement.

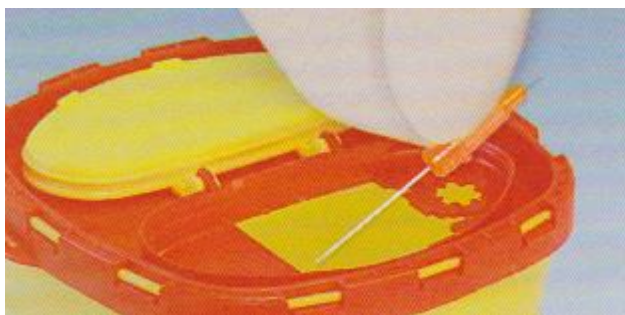

Jeter l'aiguille dans un container à déchets adapté.