

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 95.936

Fiche créée le : 05/05/2009

Dernière modification le : 23/10/2018



Désignation commerciale : Index pour capillaire plastique pour Gaz du sang
– Homogénéisation du prélèvement

Application : Prélèvement de sang capillaire pour analyses des gaz du sang

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : Index métallique pour capillaire pour gaz du sang

Normes et Directives : Dispositif Médical DIV conforme à la Directive
98/79/CE

Dimensions Pour capillaires PET de diamètre 2.05 et 2.3mm
100, 125, 140 et 175µl
Longueur 9mm
Diamètre externe 1mm

Qualité biologiques : Non stérile

Conditionnement Boîte de 250 index

Numéro de lot : Situé sur chaque boîte



Art N°: 95.936

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Usage unique

Stocker à température ambiante

Respecter le mode d'emploi situé dans chaque boîte

Guide d'utilisation des Capillaires Plastique pour Gaz du Sang

Les capillaires plastique héparinés gaz du sang sont destinés au prélèvement sanguin. Pour une compatibilité optimale avec les instruments, les capillaires sont disponibles en plusieurs tailles et volumes.

Accessoires : bouchons, barreaux et aimants pour agitation.

- Différentes tailles de bouchons sont disponibles et correspondent au diamètre externe des capillaires :
 - ≤ 2,05 mm Ref. 65.935205
 - > 2,05 mm Ref. 65.935230
- Barreaux d'agitation 1 x 9 mm Ref. 95.936
- Aimants d'agitation Ref. 95.937

Nous recommandons l'utilisation des Lancettes de Sécurité Ref. 85.1015050 à 85.1019050 pour effectuer la ponction sur le peau.

Mode d'Emploi

- Choisir le site de ponction et provoquer une augmentation de la circulation périphérique (vasodilatation).
- Mettre, sans appuyer, un bouchon sur une extrémité du capillaire.
- Introduire un barreau d'agitation dans le capillaire et le faire glisser jusqu'à l'extrémité comportant le bouchon.
- Désinfecter le site de ponction. Piquer la peau de manière à obtenir un bon écoulement sanguin. Oter la première goutte. En gardant le capillaire en position horizontale, introduire une extrémité au centre de la goutte de sang et remplir le capillaire complètement. Bien s'assurer d'empêcher l'air de rentrer dans le capillaire.
- Mettre les bouchons aux deux extrémités et obturer fermement.
- Faire glisser le barreau d'agitation sur toute la longueur du capillaire en utilisant l'aimant, et ce 10 à 15 fois pour bien mélanger le sang et l'anticoagulant.
- Analyser l'échantillon dans les 10 minutes.
- Mélanger à nouveau l'échantillon complètement et immédiatement avant l'analyse. Faire glisser le barreau d'agitation à une extrémité du capillaire.
- Retirer les 2 bouchons.
- Aspirer l'échantillon sanguin dans l'analyseur.

Attention ! - Précaution: Les échantillons sanguins sont toujours potentiellement infectieux.
Porter des gants. Pour davantage d'informations, merci de vous reporter au Manuel Opérateur de votre analyseur.

Stocker à température ambiante

SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co.
D-51588 Nümbrecht
www.sarstedt.com

Sous réserve de modification technique