



## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 95.1008**

Fiche créée le : 04/08/2018  
Dernière modification le : 31/10/2018



**Désignation commerciale :** Garrot usage unique TourniSTRETCH®  
**sans latex** pour prélèvement

**Application :** Prélèvement sanguin veineux

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Garrot **sans latex** usage unique

**Normes et Directives :** Dispositif Médical classe I conforme à la Directive 93/42/CE.

**Matière :** Bande = Polymère thermoplastique (TPE)  
Boucle = Polyéthylène (PE)

**Dimensions :** Longueur 43 cm avant étirement  
Largeur de bande 22 mm



## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 95.1008**

**Conditionnement :**

Sachet refermable de 25 garrots

**Qualité biologique :**

Non stérile

**Numéro de lot :**

Situé sur chaque carton et sachet de 25

**Date limite d'utilisation**

24 mois sortie de production  
Situé sur chaque carton et sachet

### Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à usage unique

Absence de latex

Code Cladimed (v12-2018) K54D

Facile d'emploi, se règle d'une seule main.

Elastique non traumatisant, s'adapte à tous les bras.

Déblocage rapide.

#### Manipulation



Appliquer le garrot TourniSTRETCH® autour du bras en veillant à ce que le bouton soit orienté vers le haut



Faire passer le garrot à travers la boucle et le tirer en conséquence



Enclencher le bouton dans un des trous de l'extrémité du garrot pour le fixer en position