

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 85.1637205

Fiche créée le: 26/02/2008

Dernière modification le : 23/10/2018



photo informative non contractuelle

Désignation commerciale :

Épicrânienne de sécurité courte Multifly
19mm x 0.9mm – 21G – Code couleur jaune
avec adaptateur pour S-Monovette

Application : Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description :

Épicrânienne version courte pour
prélèvement sanguin veineux avec dispositif
de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin
de prélèvement et adaptateur pour
S-Monovette®

Normes et Directives :

Dispositif Médical conforme à la Directive
93/42CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0124

Dimensions :

Longueur 19mm – 3/4"inch
Diamètre 0.9mm – 20G gauge
Tubulure 80 mm - Volume mort <120µl -

Conditionnement :

Carton de 4 boîtes de 100 épicrâniennes en
emballage unitaire, soit 400 pièces

Qualité bactériologique :

Stérile par oxyde éthylène



Art N°: 85.1637205

Numéro de lot :

Sur chaque emballage individuel, boîte et carton

Date limite d'utilisation

Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Durée de vie = 36 mois en sortie de production

Mode d'emploi – Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à Usage unique. Absence de latex

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.

Éliminer après usage en utilisant des containers adaptés conforme à la législation en vigueur.

Stocker à température ambiante.

Mode d'emploi – Épicrânienne de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®

Préparer la zone de la peau pour une piqûre intraveineuse selon le protocole de l'établissement en utilisant la technique antiseptique appropriée.

Déchirer l'emballage à l'endroit de la flèche et prendre l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder à la ponction en saisissant les ailettes de l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'adaptateur de la Safety-Multifly®. Tenir l'aiguille Safety-Multifly® par la partie arrière du protecteur d'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine.

Tout en tenant la tubulure de la Safety-Multifly® avec votre autre main, pousser le protecteur d'aiguille jusqu'à ce que celui-ci couvre l'ensemble de la longueur de l'aiguille. L'aiguille peut être clairement vue et ressentie au verrouillage dans sa position de sécurité.

Jeter l'aiguille ainsi protégée dans un container à objets tranchants (3). S'assurer de bien garder les mains derrière l'embout de l'aiguille pendant tout le temps de la procédure. Ne pas tenter de manipuler ou de retirer le mécanisme de sécurité.

ATTENTION : Ne pas utiliser d'épicrânienne provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.

