


## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 85.1638200**

Fiche créée le: 26/02/2008

Dernière modification le : 23/10/2018

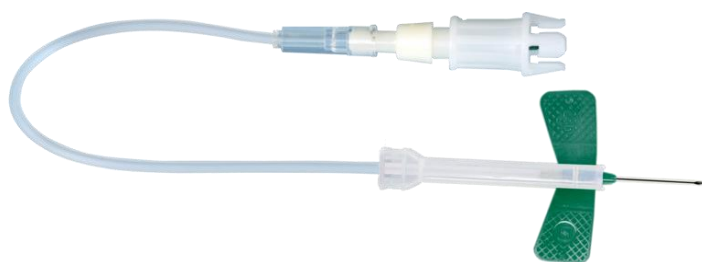

**Désignation commerciale :** Épicrânienne de sécurité longue Multifly  
19mm x 0.8mm – 21G – Code couleur vert  
avec adaptateur dévissable pour S-Monovette®

**Application :** Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette®

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Épicrânienne version longue pour  
prélèvement sanguin veineux avec dispositif  
de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin  
de prélèvement et adaptateur dévissable  
pour S-Monovette®

**Normes et Directives :** Dispositif Médical conforme à la Directive  
93/42CE  
Classe IIa  
Organisme notifié : 0124

**Dimensions :**

Longueur	19mm – 3/4"inch
Diamètre	0.8mm –21G gauge
Tubulure	200 mm
Volume mort	250µl +/- 5%



<b>Art N°: 85.1638200</b>
---------------------------

<b>Conditionnement :</b>	Carton de 4 boîtes de 100 épicrâniennes en emballage unitaire, soit 400 pièces
<b>Qualité bactériologique :</b>	Stérile par oxyde d'éthylène
<b>Numéro de lot :</b>	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
<b>Date limite d'utilisation</b>	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton Durée de vie = 36 mois en sortie de production

## **Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :**

Usage unique

Absence de DEHP

Stocker à température ambiante : 0°C / 25°C, dans un endroit sec, à l'abri des UV.

Une hausse ou une baisse de température de courte durée ne doit pas être considérée comme critique

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

### **Mode d'emploi – Épicrânienne de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®**

Préparer le site de ponction pour le prélèvement selon vos règles et recommandations internes d'hygiène et de sécurité.

Ouvrir l'emballage de l'aiguille Safety-Multifly® au niveau de la bande déchirable en suivant les flèches pour respecter l'asepsie et sortir l'aiguille entièrement. Attendre avant de retirer le manchon de protection d'être prêt à prélever, ponctionner la veine (avec le biseau de l'aiguille vers le haut) et prélever selon les instructions d'utilisation présentes sur l'emballage de la S-Monovette et selon vos propres règles et recommandations

Procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'adaptateur de la Safety-Multifly®. Tenir l'aiguille Safety-Multifly® par la partie arrière du protecteur d'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine.



<b>Art N°: 85.1638200</b>
---------------------------

Après le prélèvement : Tenir l'aiguille protégée en arrière avec le pouce au-dessus et l'index en dessous. Retirer l'aiguille Safety-Multifly® de la veine (1), en même temps fixer délicatement la tubulure avec les doigts dans la paume de la main et pousser l'aiguille protégée sous la canule (2+3) jusqu'au cran d'arrêt avec un « Click » audible pour la verrouiller dans le manchon de protection (4).

ATTENTION : Sans le « Click » audible, le mécanisme de sécurité n'est pas activé et n'offre aucune protection. Après activation du mécanisme, jeter l'ensemble de l'aiguille Safety-Multifly® verrouillée dans une boîte à déchets conforme à la réglementation (5). Assurez vous de garder votre main en arrière du dispositif durant la totalité de la procédure. Ne pas manipuler ou entraver le mécanisme de sécurité.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser une aiguille déballée ou endommagée ou déjà usagée. Porter des gants.

**Art N°: 85.1638200**

## Aiguille de sécurité Multifly®

Consignes d'utilisation pour la « technique à une seule main »

Après le prélèvement sanguin



Saisissez le protecteur d'aiguille en haut et en bas à son extrémité inférieure à l'aide de votre pouce et de votre index et tirez l'aiguille de sécurité Multifly® de la veine.



Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts...



...et glissez le protecteur d'aiguille sur l'aiguille de sécurité...



...jusqu'à ce que vous entendiez et ressentiez un déclic correspondant à son verrouillage.

### **IMPORTANT pour la technique à une seule main**

- \* Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts! ✓



Après avoir activé le mécanisme de protection, éliminez l'aiguille de sécurité Multifly® dans une boîte à déchets.



**SARSTEDT**