

FICHE TECHNIQUE

Art N°: 85.1638235

Fiche créée le: 26/05/2008

Dernière modification le : 23/10/2018



Désignation commerciale : Épicrânienne de sécurité longue Multifly
19mm x 0.8mm – 21G – Code couleur vert
avec adaptateur pour S-Monovette®

Application : Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette®

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

Description : Épicrânienne version longue pour
prélèvement sanguin veineux avec dispositif
de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin
de prélèvement et adaptateur pour
S-Monovette®

Normes et Directives : Dispositif Médical conforme à la Directive
93/42CE
Classe IIa
Organisme notifié : 0124

Dimensions :

Longueur	19mm – 3/4"inch
Diamètre	0.8mm – 21G gauge
Tubulure	200 mm

Conditionnement : Carton de 4 boîtes de 100 épicrâniennes en
emballage unitaire, soit 400 pièces



Art N°: 85.1638235

Qualité bactériologique :	Stérile par oxyde éthylène
Numéro de lot :	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
Date limite d'utilisation	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton Durée de vie = 36 mois en sortie de production

Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Article à Usage unique.

Absence de latex.

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage.

Eliminer après usage en utilisant des containers adaptés conforme à la législation en vigueur.

Stocker à température ambiante 20°C +/- 5°

Mode d'emploi – Épicrânienne de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®

Préparer la zone de la peau pour une piqûre intraveineuse selon le protocole de l'établissement en utilisant la technique antiseptique appropriée.

Déchirer l'emballage à l'endroit de la flèche et prendre l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder à la ponction en saisissant les ailettes de l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'adaptateur de la Safety-Multifly®. Tenir l'aiguille Safety-Multifly® par la partie arrière du protecteur d'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine.

Tout en tenant la tubulure de la Safety-Multifly® avec votre autre main, pousser le protecteur d'aiguille jusqu'à ce que celui-ci couvre l'ensemble de la longueur de l'aiguille. L'aiguille peut être clairement vue et ressentie au verrouillage dans sa position de sécurité.

Jeter l'aiguille ainsi protégée dans un container à objets tranchants. S'assurer de bien garder les mains derrière l'embout de l'aiguille pendant tout le temps de la procédure. Ne pas tenter de manipuler ou de retirer le mécanisme de sécurité.

Art N°: 85.1638235

ATTENTION : Ne pas utiliser d'épicrânienne provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.

Aiguille de sécurité Multifly®

Consignes d'utilisation pour la « technique à une seule main »

Après le prélèvement sanguin



Saisissez le protecteur d'aiguille en haut et en bas à son extrémité inférieure à l'aide de votre pouce et de votre index et tirez l'aiguille de sécurité Multifly® de la veine.



Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts...



...et glissez le protecteur d'aiguille sur l'aiguille de sécurité...



...jusqu'à ce que vous entendiez et ressentiez un déclic correspondant à son verrouillage.

IMPORTANT pour la technique à une seule main

- * Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts! ✓



Après avoir activé le mécanisme de protection, éliminez l'aiguille de sécurité Multifly® dans une boîte à déchets.