

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 85.1640205**

Fiche créée le: 26/02/2008

Dernière modification le : 23/10/2018



**Désignation commerciale :** Épicrânienne de sécurité courte Multifly  
19mm x 0.6mm 23G – Code couleur bleu  
avec adaptateur pour S-Monovette®

**Application :** Prélèvement sanguin veineux avec tubes S-Monovette

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Description :** Épicrânienne version courte pour  
prélèvement sanguin veineux avec dispositif  
de sécurité pour protéger l'utilisateur en fin  
de prélèvement et adaptateur pour S-  
Monovette®

**Normes et Directives :** Dispositif Médical conforme à la Directive  
93/42CE  
Classe IIa  
Organisme notifié : 0124

**Dimensions :** Longueur 19mm – 3/4"inch  
Diamètre 0.6mm – 23G gauge  
Tubulure 80 mm - Volume mort <120µl

**Conditionnement :** Carton de 4 boîtes de 100 épicrâniennes en  
emballage unitaire, soit 400 pièces



## Art N°: 85.1640205

<b>Qualité bactériologique :</b>	Stérile par oxyde éthylène
<b>Numéro de lot :</b>	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton
<b>Date limite d'utilisation</b>	Sur chaque emballage individuel, boîte et carton Durée de vie = 36 mois en sortie de production

### Mode d'emploi –Limites d'utilisation – Recommandations :

Usage unique

Absence de DEHP

Stocker à température ambiante : 0°C / 25°C, dans un endroit sec, à l'abri des UV.

Une hausse ou une baisse de température de courte durée ne doit pas être considérée comme critique

Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

### Mode d'emploi – Épicrânienne de sécurité pour prélèvement sanguin avec S-Monovette ®

Préparer la zone de la peau pour une piqûre intraveineuse selon le protocole de l'établissement en utilisant la technique antiseptique appropriée.

Déchirer l'emballage à l'endroit de la flèche et prendre l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder à la ponction en saisissant les ailettes de l'aiguille Safety-Multifly®.

Procéder au prélèvement sanguin selon le mode d'emploi figurant sur l'emballage de la S-Monovette ® et selon le protocole de l'établissement. Enlever la dernière S-Monovette ® de l'adaptateur de la Safety-Multifly®. Tenir l'aiguille Safety-Multifly® par la partie arrière du protecteur d'aiguille et **enfin** retirer l'aiguille de la veine.

Tout en tenant la tubulure de la Safety-Multifly® avec votre autre main, pousser le protecteur d'aiguille jusqu'à ce que celui-ci couvre l'ensemble de la longueur de l'aiguille. L'aiguille peut être clairement vue et ressentie au verrouillage dans sa position de sécurité.

Jeter l'aiguille ainsi protégée dans un container à objets tranchants. S'assurer de bien garder les mains derrière l'embout de l'aiguille pendant tout le temps de la procédure. Ne pas tenter de manipuler ou de retirer le mécanisme de sécurité.

## Art N°: 85.1640205

**ATTENTION :** Ne pas utiliser d'épicrânienne provenant d'emballage ouvert ou endommagé. Porter des gants.

### Aiguille de sécurité Multifly®

Consignes d'utilisation pour la « technique à une seule main »

Après le prélèvement sanguin



Saisissez le protecteur d'aiguille en haut et en bas à son extrémité inférieure à l'aide de votre pouce et de votre index et tirez l'aiguille de sécurité Multifly® de la veine.



Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts...



...et glissez le protecteur d'aiguille sur l'aiguille de sécurité...



...jusqu'à ce que vous entendiez et ressentiez un déclic correspondant à son verrouillage.

#### **IMPORTANT pour la technique à une seule main**

- \* Fixez légèrement la tubulure dans la paume de la main à l'aide de vos doigts! ✓



Après avoir activé le mécanisme de protection, éliminez l'aiguille de sécurité Multifly® dans une boîte à déchets.