

FICHE TECHNIQUE

BRGARP902

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:50:26



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

BRGARP902

Désignation

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2

Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

1

FICHE TECHNIQUE

BRGARP902

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:50:26

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Matière bande	Tissu
Composition bande	<ul style="list-style-type: none"> - Fils de coton - Polyamide - Polyuréthane
Longueur (en cm)	57,0
Tolérance (en cm)	1,00
Largeur (en cm)	2,3
Epaisseur (en mm)	2,3
Poids (en g)	23,0
Couleur	Vert
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Autoclavable	Oui
Désinfection	<ul style="list-style-type: none"> - Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldéhydes) - Concentration habituelle de la dissolution: 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presser le cran de sécurité et extraire la bande. 2. Glisser la nouvelle bande sous le ressort de la boucle, puis dans la pièce du bout. 3. Contrôler sa bonne fixation
Nombre de poussoirs	1

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

FICHE TECHNIQUE

BRGARP902

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:50:26

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

PRAMETA

Référence du fournisseur

902-3

Pays d'origine

ALLEMAGNE