

FICHE TECHNIQUE

ENAT1MLM

Milieu eNat™ liquide 1ml + 1 écouvillon floqué embout Minitip stérile bleu

CODE ARTICLE : 018342

DATE D'EDITION : 08/06/2018 09:31:38



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

ENAT1MLM

Désignation

Milieu eNat™ liquide 1ml + 1 écouvillon floqué embout Minitip stérile bleu

Application

- Milieu spécifiquement adapté pour les techniques de biologie moléculaire

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

FICHE TECHNIQUE

ENAT1MLM

Milieu eNat™ liquide 1ml + 1 écouvillon floqué embout Minitip stérile bleu

CODE ARTICLE : 018342

DATE D'EDITION : 08/06/2018 09:31:38

Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 500

Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	80mm
Matière de l'embout	Nylon
Type de l'embout	Minitip
Site de prélèvement	Œil - Oreille Nez Urètre Pédiatrie
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	151,0
Type de milieu	LBM
Nom du milieu	eNat™
Etat du milieu	Liquide
Volume de milieu (en ml)	1,0
Composition du milieu	- Thyocianate de Guanidine - Tris-EDTA - HEPES - Détergent
Couleur du bouchon	Bleu
Technique d'analyse	Biologie moléculaire
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Sachet pelable unitaire
Mode d'emploi	1. Ouvrir le sachet pour le prélèvement d'échantillons eNat™ et sortir le tube et l'écouvillon. 2. Utiliser l'écouvillon pour faire le prélèvement. Pour éviter tout risque de contamination, faire en sorte que la pointe de l'écouvillon entre

FICHE TECHNIQUE

ENAT1MLM

Milieu eNat™ liquide 1ml + 1 écouvillon floqué embout Minitip stérile bleu

CODE ARTICLE : 018342

DATE D'EDITION : 08/06/2018 09:31:38

Autres caractéristiques

seulement en contact avec le site de prélèvement.

3. Dévisser et enlever le bouchon du tube eNat™ en évitant de faire sortir du milieu.

4. Insérer l'écouvillon à l'intérieur du tube jusqu'à ce que le point de fracture atteigne le niveau de l'ouverture du tube.

5. Plier l'écouvillon et le briser à la hauteur du point de fracture en gardant le tube loin du visage

6. Remettre le bouchon sur le tube et le visser.

7. Indiquer les données du patient sur l'étiquette du tube ou coller l'étiquette d'identification du patient.

8. Envoyer le tube au laboratoire.

- Dimensions du tube = 12x80mm

- DNase et RNase Free

- Tube résistant à 95kPa

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Oui

Durée de vie (en mois)

12

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

COPAN ITALIA S.p.A.

Référence du fournisseur

608CS01M

Pays d'origine

ITALIE