

FICHE TECHNIQUE

GARP-E

Garrot Prameta Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:51:02



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

GARP-E

Désignation

Garrot Prameta Easy avec latex

Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 10

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

FICHE TECHNIQUE

GARP-E

Garrot Prameta Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:51:02

Descriptif du produit

Matière bande	Tissu
Composition bande	<ul style="list-style-type: none"> - Fils de coton - Polyamide - Latex
Matière boucle	Métallique
Composition boucle	Alliage aluminium
Longueur (en cm)	57,0
Tolérance (en cm)	1,00
Largeur (en cm)	2,3
Epaisseur (en mm)	2,3
Poids (en g)	55,0
Couleur	Rouge
Latex	Oui
Autoclavable	Oui
Désinfection	<ul style="list-style-type: none"> - Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldéhydes) - Concentration habituelle de la dissolution: 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placer le garrot à l'endroit de la ponction. Encliqueter le bloc de fixation « Easy » dans la boucle métallique 2. Placer le canal ouvert du bloc de fixation «Easy» en regard de la veine à ponctionner et le tenir d'une main. De l'autre, tirer le bout de la bande jusqu'à l'obtention de la tension souhaitée 3. Ponctionner juste devant le canal ouvert du bloc de fixation «Easy». Grâce à ce canal ouvert, l'injection est possible, même sans réduction de la stase 4. Pour réduire progressivement la stase, appuyer sur le poussoir de la boucle métallique 5. Pour défaire le garrot, appuyer sur le bloc de fixation « Easy »

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

GARP-E

Garrot Prameta Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 30/01/2018 10:51:02

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

PRAMETA

Référence du fournisseur

EASY-904

Pays d'origine

ALLEMAGNE