

# Instruction d'Utilisation

## MiniCollect® la solution pour le prélèvement capillaire

### MiniCollect® Ordre de prélèvement


|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | EDTA                        |
| 2  | Héparine (avec ou sans gel) |
| 3  | Glucose                     |
| 4  | Sérum (avec ou sans gel)    |
| ou |                             |
| 4  | Sans additif                |



**1** Réchauffer le site de ponction. Puis, désinfecter le site selon les bonnes pratiques.




**2** La ligne présente au sommet du tube indique la position d'ouverture. Retirer le bouchon du tube en réalisant une légère pression en direction ascendante.

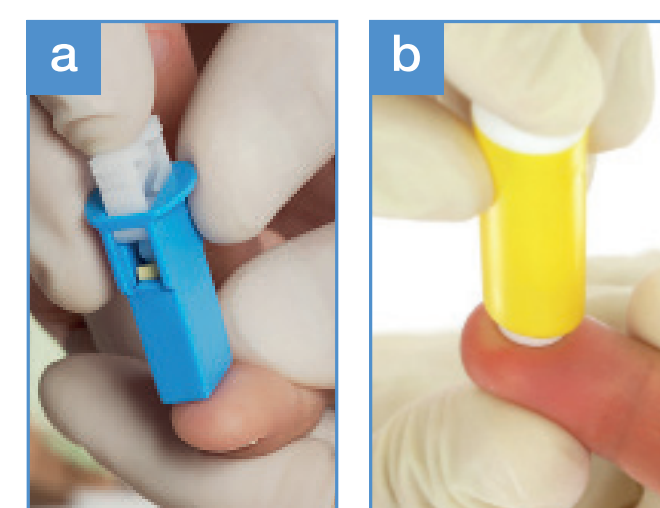

**3** Positionner la lancette de sécurité (a) ou la lancette de sécurité Lancelino (b) sur la partie superficielle de l'épiderme et réaliser la ponction.



**4** Exercer une légère pression du site de ponction. Eliminer la première goutte de sang.

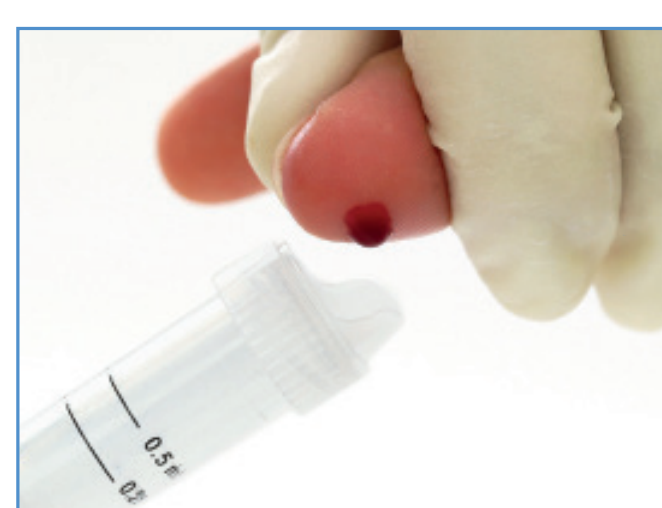


**5** Déposer les gouttes de sang suivantes sur le bec de recueil. Ce dernier permet de les faire couler le long de la paroi du tube. Le site de ponction doit être orienté vers le bas.



**6** Fermer le tube avec le bouchon adéquat. Un "clic" audible indique la bonne fermeture du système.



**7** A l'issue du prélèvement, assurer 8 à 10 retournements du tube.

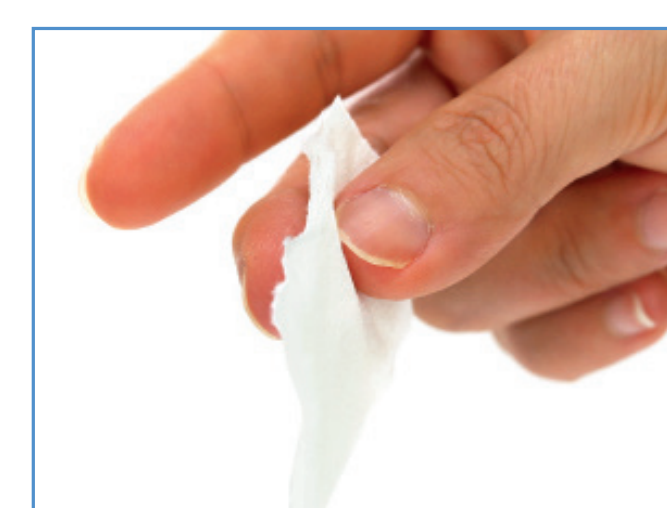

**8** Appliquer une pression sur le site de ponction

### En complément : Tube Coagulation MiniCollect®

Le tube de coagulation MiniCollect® nécessite obligatoirement une procédure de recueil de sang veineux.



**1** Retirer le bouchon.



**2** Transférer le sang veineux dans le tube.



**3** Fermer le tube avec le bouchon original.



**4** A l'issue du prélèvement, assurer 4 à 5 retournements du tube.



**5** Si besoin, le tube peut être placé dans un tube de transport 13x75.

### Lancette de sécurité / Lancette de sécurité Lancelino MiniCollect®

#### Large gamme de lancettes de sécurité

Le volume de sang dépend de la taille de la lancette et est indiqué avec des gouttes de sang.

#### Lancette de sécurité avec aiguille

Lancette de sécurité, lavande, 28G, profondeur de pénétration 1 mm



Lancette de sécurité, orange, 23 G, profondeur de pénétration 2.25 mm



#### Lancette de sécurité avec lame

Lancette de sécurité, rose, profondeur de pénétration 1 mm



Lancette de sécurité, verte, profondeur de pénétration 1.5 mm



Lancette de sécurité, bleue, profondeur de pénétration 2 mm



#### Lancette de sécurité Lancelino avec aiguille (sterile)

Lancette de sécurité verte, 30G, profondeur de pénétration 1.2 mm



Lancette de sécurité lavande, 25G, profondeur de pénétration 1.5 mm



Lancette de sécurité bleue, 21G, profondeur de pénétration 1.8 mm



Lancette de sécurité verte, 21G, profondeur de pénétration 2.4 mm



#### Lancette de sécurité Lancelino avec lame (sterile)

Lancette de sécurité jaune, 0.8 mm, profondeur de pénétration 2 mm



Pour obtenir des recommandations plus complètes, visitez la page web suivante: [www.gbo.com](http://www.gbo.com)

Note : Suivez toujours le protocole de votre établissement pour l'ordre de prélèvement des tubes. Mentions légales : L'information contenue dans ce document est l'opinion des auteurs et n'implique pas une approbation formelle de la part de Greiner Bio-One (ou des organisations extérieures qui emploient les auteurs). Il est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un avis médical et n'est pas destiné ou recommandé en remplacement du conseil médical professionnel. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas le jugement éclairé et le lecteur est seul responsable des décisions pouvant découler, en tout ou en partie, de l'utilisation ou de l'utilisation des informations contenues dans le document. Dans la mesure permise par la loi applicable, ni Greiner Bio-One ni les auteurs ne sont responsables des décisions prises, des mesures prises ou de l'inaction en se fondant sur les informations, les relevés, les évaluations ou les recommandations énoncés dans ce document.