

FICHE TECHNIQUE

VK053SHL

Tube sous vide Vacutest® en PET 3ml/5ml héparine de lithium stérile

CODE ARTICLE : 016641

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:42:54



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

VK053SHL

Désignation

Tube sous vide Vacutest® en PET 3ml/5ml héparine de lithium stérile

Application

- Prélèvement d'échantillons sanguins

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

FICHE TECHNIQUE

VK053SHL

Tube sous vide Vacutest® en PET 3ml/5ml héparine de lithium stérile

CODE ARTICLE : 016641

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:42:54

Descriptif du produit

Application majeure	Biochimie
Nature de l'additif	Héparine de lithium
Présentation de l'additif	Liquide pulvérisé
Concentration de l'additif	17 UI/ml de sang
Matière du tube	Polytétréphthalate d'éthylène
Paroi du tube	Standard
Diamètre du tube (en mm)	13
Hauteur du tube (en mm)	75
Volume du tube (en ml)	5
Volume de vide (en ml)	3
Type de bouchon	Coiffant
Couleur du bouchon	Vert
Descriptif du bouchon	<ul style="list-style-type: none"> - Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène - Hauteur : 2 cm avec rainures - Code couleur ISO 6710:1995
Etiquetage	Papier auto-adhésif
Indicateur du niveau de remplissage	Oui
Nombre d'inversions	6 à 8
Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)	Aucun
Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)	Aucun
Vitesse de centrifugation (en g)	1300-2000
Température de centrifugation (en °C)	20-25
Durée de centrifugation (en min)	10
Délai de conservation après centrifugation, à 2-4°C	> 8 heures ≤ 48 heures
Délai de conservation après centrifugation, jusqu'à 24°C	≤ 8 heures
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme au marquage CE (DIV) - Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement

FICHE TECHNIQUE

VK053SHL

Tube sous vide Vacutest® en PET 3ml/5ml héparine de lithium stérile

CODE ARTICLE : 016641

DATE D'EDITION : 22/02/2018 15:42:54

- Conforme au CLSI
- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	VACUTEST KIMA SRL
Référence du fournisseur	12008
Pays d'origine	ITALIE