


## FICHE TECHNIQUE

**VK075SAS**

Tube sous vide Vacutest® en PET 5ml/7ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016565

DATE D'EDITION : 22/02/2018 16:01:55

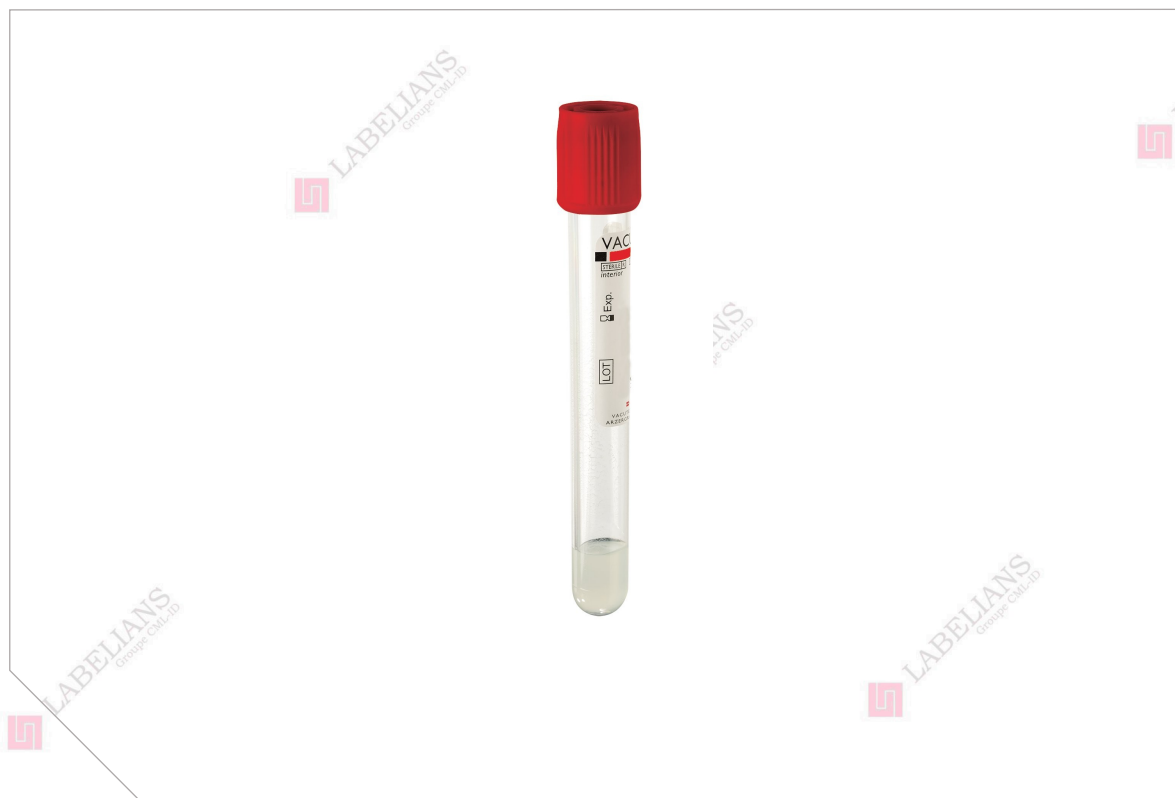

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

VK075SAS

### Désignation

Tube sous vide Vacutest® en PET 5ml/7ml sec avec gel stérile

### Application

- Prélèvement d'échantillons sanguins

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 500

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

## FICHE TECHNIQUE

**VK075SAS**

Tube sous vide Vacutest® en PET 5ml/7ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016565

DATE D'EDITION : 22/02/2018 16:01:55

### Descriptif du produit

<b>Application majeure</b>	Biochimie
<b>Nature de l'additif</b>	Activateur de coagulation et gel
<b>Présentation de l'additif</b>	Gel
<b>Matière du tube</b>	Polytéréphtalate d'éthylène
<b>Paroi du tube</b>	Standard
<b>Diamètre du tube (en mm)</b>	13
<b>Hauteur du tube (en mm)</b>	100
<b>Volume du tube (en ml)</b>	7
<b>Volume de vide (en ml)</b>	5
<b>Type de bouchon</b>	Coiffant
<b>Couleur du bouchon</b>	Rouge
<b>Descriptif du bouchon</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène</li> <li>- Hauteur : 2 cm avec rainures</li> <li>- Code couleur ISO 6710:1995</li> </ul>
<b>Etiquetage</b>	Papier auto-adhésif
<b>Indicateur du niveau de remplissage</b>	Oui
<b>Nombre d'inversions</b>	6 à 8
<b>Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)</b>	30
<b>Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)</b>	Aucun
<b>Vitesse de centrifugation (en g)</b>	1300-2000
<b>Température de centrifugation (en °C)</b>	20-25
<b>Durée de centrifugation (en min)</b>	10
<b>Délai de conservation après centrifugation, à 2-4°C</b>	7 jours
<b>Délai de conservation après centrifugation, jusqu'à 24°C</b>	≤ 48 heures
<b>Délai de conservation après centrifugation, ≤ -20°C</b>	> 7 jours
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile - Irradiation
<b>A usage unique</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conforme au marquage CE (DIV)</li> <li>- Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement</li> <li>- Conforme au CLSI</li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

**VK075SAS**

Tube sous vide Vacutest® en PET 5ml/7ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016565

DATE D'EDITION : 22/02/2018 16:01:55

- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	VACUTEST KIMA SRL
Référence du fournisseur	10020
Pays d'origine	ITALIE