


MASQUE BOUCHE A BOUCHE
QUICKSAVER
DESTINE A ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES
FORMEES AU BOUCHE A BOUCHE

Victime ne réagissant
ou ne respirant pas



Dégager les voies aériennes.
Basculer en arrière la tête de
la victime et ouvrir la mâchoire

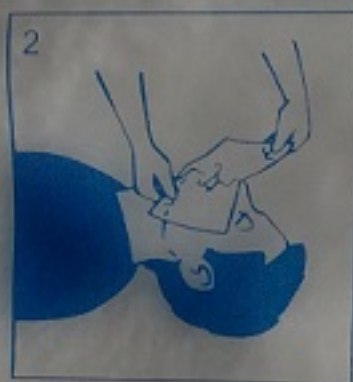

Placer la valve du « QUICKSAVER »
entre les dents de la victime



**THIS
SIDE
UP**



Pincer le nez de la victime
Introduire de l'air via la valve
contrôler si la poitrine se soulève



Laisser la victime respirer.
Répétez immédiatement l'opération.
Commencer la RCP si besoin



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO., LTD
NO 2 XIHU EAST ROAD, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA



SUNGO CERTIFICATION COMPANY LIMITED
RM 101, MAPLE HOUSE, 118 HIGH STREET, PURLEY, LONDON, ENGLAND

Distribué en France par CORBEN +33 2 35 300 185

