

Humidificateur néonatal Hydraltis


Guide de bon usage



Raccordements :




Raccorder le câble d'alimentation des fils chauffants inspiratoires et expiratoires

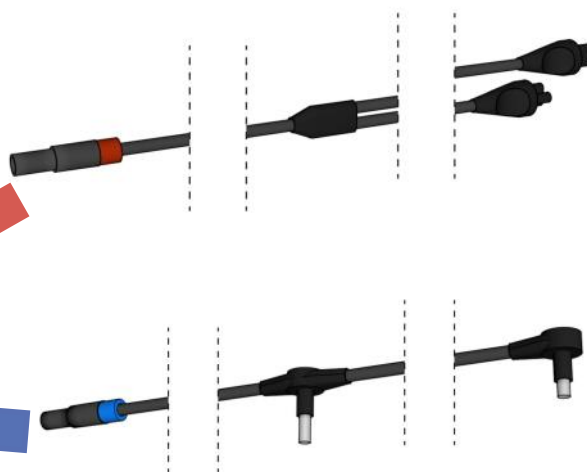

Raccorder le câble des sondes de températures : chambre d'humidification et proximale

Montage circuits bi-chauffé 07137 NS :

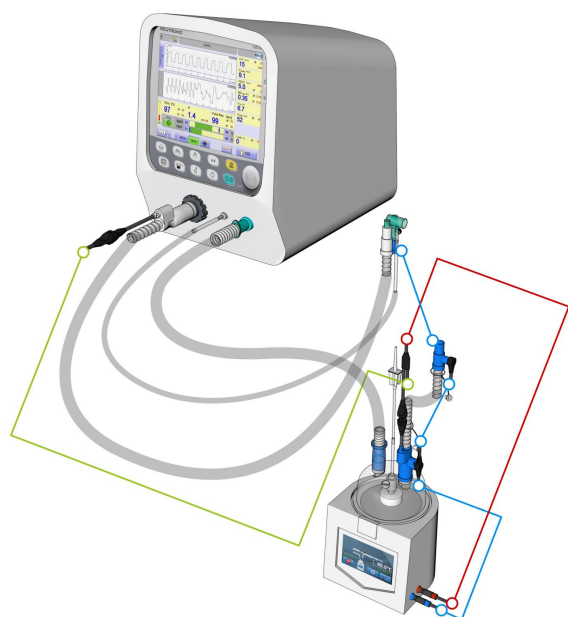


Position sonde température proximale à adapter selon la température de l'incubateur

Paroi incubateur

Extension non chauffée :
Incubateurs > 35°C

À conserver
Sonde de Tp à l'extérieur

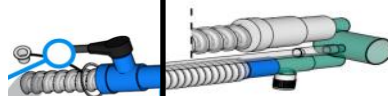

Paroi incubateur

Extension non chauffée :
Incubateurs < 35°C

À retirer
Sonde de Tp à l'intérieur




Démarrage de l'humidificateur :

Après démarrage de la ventilation, vérifier le réglage des températures

Ecran de surveillance :

Température réglée à la chambre d'humidification

Schéma circuit raccordé mono ou bi-chauffé

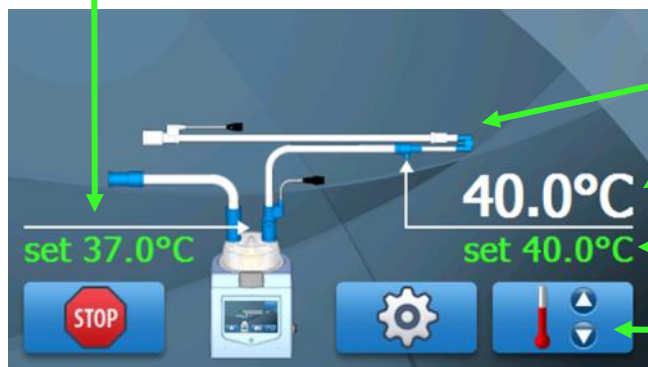

Température proximale mesurée

Température proximale réglée

Réglages températures

Ecran de réglage des températures :

Réglage température chambre d'humidification



Réglage température proximale

Suggestion de réglages et critères d'ajustement des températures :

Tp incubateur	Sonde et extension	Tp chambre d'humidification	Tp proximale
31-32°C	Intérieur et retirée	35°C	38
33-35°C	Intérieur et retirée	36,5°C	40°C
36-37°C	Extérieur et en place	36,5°C	40°C

Si condensation en branche inspiratoire :

- Vérifier montage circuit et position sonde selon page N°2
- Ajuster la température de la chambre en baissant de 0,5°C/30 min.

Alarmes :

- Appuyer sur les icônes d'alarme pour obtenir des informations supplémentaires

Alarme priorité élevée :



Alarme priorité moyenne/basse



Silence alarme :



Dispositif médical de classe IIb selon la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CE
Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation accompagnant les dispositifs ou suivez les instructions figurant sur l'étiquetage produit

Produit marqué CE 0123
Produits non remboursés en France

DEAS sarl
via dell'Industria, 49
48014 Castel Bolognese [RA] Italy

Siège social 26 rue de la Montée 68720—Flaxlanden
Locaux IDF 12-14 rue Sarah Bernhardt 92600—
Asnières sur Seine

WWW.TSFRANCE.COM
T + 33 (0)3 89 06 14 44