

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO	
		Indice :	2
		Date :	01/06/2018

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
A80020	STYLET OLIVAIRE DOUBLE L:140MM D:2,0MM	3661219001218
	OLIVAIRE PROBES DOUBLE L:140MM	 3 661219 001218

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

15-012

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Stylets - Probes - Estiletes

Double
Double
Doble

Ø 2 mm

Ø 2 mm

A80020
14 cm - 5 1/2 "

Simple
Simple
Simple

Ø 2 mm

Ø 2 mm

A80010
14 cm - 5 1/2 "

Cannelé
Fluted
Acanalado

Ø 2 mm

2 mm

A80030
14 cm - 5 1/2 "

Aiguillé
With eye
Agujada

Ø 2 mm

5 mm

A80040
14 cm - 5 1/2 "

WATSON
CHEYNE

Ø 1,5 mm

3,7 mm

A800410
18 cm - 7 "

FISH

Ø 2 mm

18 cm - 7 "

A800420

Ø 1,0 mm

14 cm - 5 1/2 " A800110

Ø 1,5 mm

13 cm - 5 1/4 " A800151

14 cm - 5 1/2 " A800152

16 cm - 6 1/4 " A800153

18 cm - 7 " A800154

20 cm - 8 " A800155

Ø 2,0 mm

14 cm - 5 1/2 " A80020

16 cm - 6 1/4 " A800201

18 cm - 7 " A800202

20 cm - 8 " A800203

25 cm - 9 3/4 " A800204

XV - Divers
XV - Miscellaneous
XV - Diversas

XV - 12

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
A80020	STYLET OLIVAIRE DOUBLE L:140MM D:2,0MM	3661219001218
	OLIVAIRE PROBES DOUBLE L:140MM	 3 661219 001218

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

11290

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

15-012

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*