

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
A800410	STYLET WATSON-CHEYNE DOUBLE L:180MM D:1,5X3,7MM	3661219331469
	WATSON-CHEYNE DOUBLE PROBE L:180MM D:1,5X3,7MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015


Chapitre-page

15-012

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R
Stylets - Probes - Estiletes

**WATSON
CHEYNE**

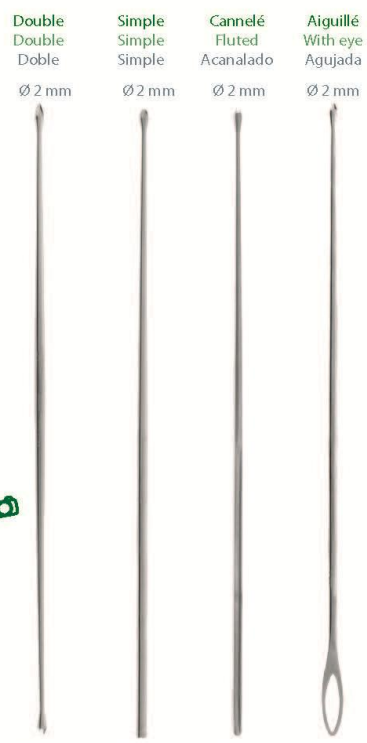

Double
Double
Doble

Simple
Simple
Simple

Cannelé
Fluted
Acanalado

Aiguillé
With eye
Agujada

Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm Ø 2 mm

FISH



Ø 1,5 mm Ø 2 mm

Ø 1,0 mm 14 cm - 5 1/2" A800110 Ø 1,5 mm 13 cm - 5 1/4" A800151 14 cm - 5 1/2" A800152 16 cm - 6 1/4" A800153 18 cm - 7" A800154 20 cm - 8" A800155 Ø 2,0 mm 14 cm - 5 1/2" A80020 16 cm - 6 1/4" A800201 18 cm - 7" A800202 20 cm - 8" A800203 25 cm - 9 3/4" A800204	Ø 2 mm A80020 14 cm - 5 1/2" Ø 2 mm A80010 14 cm - 5 1/2" 2 mm A80030 14 cm - 5 1/2" 5 mm A80040 14 cm - 5 1/2" 3,7 mm A800410 18 cm - 7" A800420 18 cm - 7"
---	---

XV - Divers
XV - Miscellaneous
XV - Diversas

XV - 12

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
A800410	STYLET WATSON-CHEYNE DOUBLE L:180MM D:1,5X3,7MM	3661219331469
	WATSON-CHEYNE DOUBLE PROBE L:180MM D:1,5X3,7MM	 3 661219 331469

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

11290

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X2CrNi19-11(1.4306)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

15-012

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).