

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE     | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS     | CODE EAN                                                                                               |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B25285</b> | CISEAUX MOUSSES DROITS L:160MM  | 3661219003984                                                                                          |
|               | BLUNT SCISSORS STRAIGHT L:160MM | <br>3 661219 003984 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-009

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

**L A N D A N G E R**

Ciseaux chirurgicaux - Surgical scissors - Tijeras quirúrgicas

| Droit<br>Straight<br>Recta |                | Courbe<br>Curved<br>Curva |
|----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>B25255</b>              | 11 cm - 4 1/4" | <b>B25260</b>             |
| <b>B25261</b>              | 13 cm - 5"     | <b>B25262</b>             |
| <b>B25275</b>              | 14 cm - 5 1/2" | <b>B25280</b>             |
| <b>B25285</b>              | 16 cm - 6 1/4" | <b>B25290</b>             |
| <b>B25295</b>              | 18 cm - 7"     | <b>B25300</b>             |
| <b>B25302</b>              | 20 cm - 8"     | <b>B25303</b>             |

Mousse / Mousse  
Blunt / Blunt  
Roma / Roma



**B25261**  
13 cm - 5"



**B25262**  
13 cm - 5"

III - 9

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015


III - Ciseaux  
III - Scissors  
III - Tijeras

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i> | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B25285    | CISEAUX MOUSSES DROITS L:160MM     | 3661219003984                                                                                          |
|           | BLUNT SCISSORS STRAIGHT L:160MM    | <br>3 661219 003984 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

38727

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X39Cr13(1.4031)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

03-009

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*