

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B25418	CISEAUX D'ALLAIRE COURBES L:130MM	3661219004318
	ALLAIRE SCISSORS CURVED L:130MM	 3 661219 004318

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-015

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Ciseaux délicats - Delicate scissors - Tijeras delicadas

ALLAIRE <table border="0"> <tr> <td>Droit Straight Recta</td> <td>Courbe Curved Curva</td> </tr> <tr> <td>13 cm - 5"</td> <td>12 cm - 4 3/4"</td> </tr> <tr> <td>B25415</td> <td>B25418</td> </tr> </table>	Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva	13 cm - 5"	12 cm - 4 3/4"	B25415	B25418	KILNER (RAGNELL) <table border="0"> <tr> <td>Courbe Curved Curva</td> </tr> <tr> <td>12 cm - 4 3/4"</td> </tr> <tr> <td>13 cm - 5"</td> </tr> <tr> <td>15 cm - 6"</td> </tr> <tr> <td>B25421</td> </tr> <tr> <td>B254220</td> </tr> <tr> <td>B25426</td> </tr> </table>	Courbe Curved Curva	12 cm - 4 3/4"	13 cm - 5"	15 cm - 6"	B25421	B254220	B25426
Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva													
13 cm - 5"	12 cm - 4 3/4"													
B25415	B25418													
Courbe Curved Curva														
12 cm - 4 3/4"														
13 cm - 5"														
15 cm - 6"														
B25421														
B254220														
B25426														

Spatulé
Spatula
Espatula



B25415
13 cm - 5"



B25418



B25421
12 cm - 4 3/4"

III - 15

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B25418	CISEAUX D'ALLAIRE COURBES L:130MM	3661219004318
	ALLAIRE SCISSORS CURVED L:130MM	 3 661219 004318

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X39Cr13(1.4031)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-015

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).