

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B25816	CISEAUX MICRO DROITS POINTUS L:95MM	3661219005094
	MICRO SCISSORS POINTED STRAIGHT 95MM	 3 661219 005094

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-038

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

III - Ciseaux
III - Scissors
III - Tijeras

LANDANGER

Ciseaux fins - Fine scissors - Tijeras finas

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LA GRANGE

Lames standards
Standard blades
Hojas normales



B258175
11,5 cm - 4 1/2"

Lames dentelées
Serrated blades
Hojas serradas



B258176
11,5 cm - 4 1/2"

KNAPP

	Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva
Mousse-Mousse / Blunt-Blunt / Roma-Roma	10,5 cm - 4" B258180	B258181
Pointu-Mousse / Sharp-Blunt / Aguda-Roma	10,5 cm - 4" B258182	B258183
Pointu-Pointu / Sharp-Sharp / Aguda-Aguda	10,5 cm - 4" B258184	B258185



B258183

MICRO

	Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva
9 cm - 3 1/2"	B25816	B25817
10,5 cm - 4"	B258161	B258171
11,5 cm - 4 1/2"	B258162	B258172



B25816
9 cm - 3 1/2"

III - 38

 1/1

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B25816	CISEAUX MICRO DROITS POINTUS L:95MM	3661219005094
	MICRO SCISSORS POINTED STRAIGHT 95MM	 3 661219 005094

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X39Cr13(1.4031)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-038

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Sterilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*