

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B258460	CISEAUX COUPE-FIL EISELSBERG L:110MM	3661219332398
	<i>EISELBERG WIRE CUTTING SCISSORS L:110MM</i>	 3 661219 332398

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

03-031

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Ciseaux pour couper les fils - Wire cutting scissors - Tijeras para cortar hilos

HARVEY  B25780 12 cm - 4 3/4"	UNIVERSEL  B25786 12 cm - 4 3/4"	BEEBE <table border="0"> <tr> <td>Droit Straight Recta</td> <td>Courbe Curved Curva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pointu - Sharp - Aguda</td> </tr> <tr> <td>10 cm - 4"</td> <td>B258445 B25845 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mousse - Blunt - Roma</td> </tr> <tr> <td>10 cm - 4"</td> <td>- B258451</td> </tr> </table>  B25845 10 cm - 4"	Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva	Pointu - Sharp - Aguda		10 cm - 4"	B258445 B25845 	Mousse - Blunt - Roma		10 cm - 4"	- B258451
Droit Straight Recta	Courbe Curved Curva											
Pointu - Sharp - Aguda												
10 cm - 4"	B258445 B25845 											
Mousse - Blunt - Roma												
10 cm - 4"	- B258451											
EISELSBERG  B258460 11 cm - 4 1/2"	SCHOEMAKER-LOTH  B258465 12,5 cm - 5"											

Lames dentelées
Serrated blades
Hojas serradas

Lames dentelées
Serrated blades
Hojas serradas

III - Ciseaux
III - Scissors
III - Tijeras

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



III - 31

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B258460	CISEAUX COUPE-FIL EISELSBERG L:110MM	3661219332398
	EISELBERG WIRE CUTTING SCISSORS L:110MM	 3 661219 332398

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X39Cr13(1.4031)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*