

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B35150	CISEAUX METZENBAUM DROITS L:200MM TUNGSTENE	3661219005841
	METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT L:200MM TUNGSTEN	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

03-062

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

III - Ciseaux
III - Scissors
III - Tijeras

LANDANGER

Ciseaux tungstène - Tungsten scissors - Tijeras de tungsteno

METZENBAUM

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



TC Insert

Droit - Straight - Recta



Standard
Standard
Estándar

Courbe - Curved - Curva




Standard
Standard
Estándar

	Baby	B35104	B35104M		B35106	B35106M	B35106SB
		B35110				B35120	B35120SB
		B35130				B35140	B35140SB
		B35150				B35160	B35160SB
		B35172				B35174	B35174SB
		B351750				B351751	
		B351780				B351781	
		B35250				B35240	



B35110
15 cm - 6"



B35120
15 cm - 6"

III - 62

* Microcut : 1 lame TC standard + 1 lame TC microdentée - 1 TC standard blade + 1 hoja TC estándar + 1 hoja TC micro serrada

* SupercutBlack : 1 lame TC microdentée + 1 lame TC usoir + 1 lame de 1 lame noir - 1 TC serrated blade + 1 TC usor blade + Black coating - 1 hoja TC micro serrada + 1 hoja TC cavaña + recubrimiento negro



LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B35150	CISEAUX METZENBAUM DROITS L:200MM TUNGSTENE	3661219005841
	METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT L:200MM TUNGSTEN	 3 661219 005841

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

38727

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :
Material grade :

X39Cr13(1.4031) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

03-062

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*