

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE     | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                           | CODE EAN                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B40175</b> | PINCE DISSECTION CLOVIS VINCENT L:200MM DROITE 1X2<br>GRIFFES MORS TRES FINS | 3661219006480                                                                                          |
|               | VINCENT DISSECTING FORCEPS WITH TEETH L:200MM                                | <br>3 661219 006480 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

02-011

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

**L A N D A N G E R**

Pinces à dissection très fines - Very fine dissecting forceps - Pinzas para disección muy finas

---

**CLOVIS VINCENT**

TRÈS FINE - VERY FINE - MUY FINA

|         |                             |         |
|---------|-----------------------------|---------|
| B401698 | 15 cm - 6"                  | B401748 |
| B401699 | 18 cm - 7"                  | B401749 |
| B40170  | 20 cm - 8"                  | B40175  |
| B401710 | 25 cm - 10"                 | B401760 |
| B401711 | 30 cm - 11 <sup>3/4</sup> " | B401761 |

Sans griffes  
Without teeth  
Sin dientes



**B40170**  
20 cm - 8"

1 x 2 griffes  
1 x 2 teeth  
1 x 2 dientes



**B40175**  
20 cm - 8"

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



II - 11

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                           | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40175    | PINCE DISSECTION CLOVIS VINCENT L:200MM DROITE 1X2<br>GRIFFES MORS TRES FINS | 3661219006480                                                                                          |
|           | VINCENT DISSECTING FORCEPS WITH TEETH L:200MM                                | <br>3 661219 006480 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

62466

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

02-011

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*