

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                  | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40375    | PINCE DISSECTION ADLERKREUTZ 3 ET 4 GRIFFES L:160MM | 3661219006879                                                                                          |
|           | ADLERKREUTZ DISSECTING FORCEPS 3X4 TEETH L:160MM    | <br>3 661219 006879 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

02-016

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

LANDANGER

Pinces à dissection délicates - Delicate dissecting forceps - Pinzas para disección delicadas

| 3 x 4 griffes<br>3 x 4 teeth<br>3 x 4 dientes                                            | ADLERKREUTZ     | 5 x 6 griffes<br>5 x 6 teeth<br>5 x 6 dientes                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40374                                                                                   | 14 cm - 5 1/2"  | -                                                                                           |
|  B40375 | 16 cm - 6 1/4"  | B403959  |
| B40380                                                                                   | 18 cm - 7"      | B403960                                                                                     |
| B40385                                                                                   | 20 cm - 8"      | B403961                                                                                     |
| B40390                                                                                   | 25 cm - 10"     | B403962                                                                                     |
| B403950                                                                                  | 30 cm - 11 3/4" | B403963                                                                                     |



B40375  
16 cm - 6 1/4"



B403959  
16 cm - 6 1/4"

À talon  
With heel  
Con talón



Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                  | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B40375    | PINCE DISSECTION ADLERKREUTZ 3 ET 4 GRIFFES L:160MM | 3661219006879                                                                                          |
|           | ADLERKREUTZ DISSECTING FORCEPS 3X4 TEETH L:160MM    | <br>3 661219 006879 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

62466

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

02-016

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*