

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                         | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B406911   | PINCE DISSECTION WANGENSTEEN L:230MM DROITE MORS TUNGSTENE | 3661219334187                                                                                          |
|           | WANGENSTEEN DISSECTING FORCEPS L:230MM STRAIGHT TUNGSTEN   | <br>3 661219 334187 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

02-045

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Pinces à dissection mors tungstène - Dissecting forceps with tungsten jaws - Pinzas para disección boca de tungsteno

| STANDARD<br>STANDARD<br>ESTÁNDAR | OEHLER  | WANGENSTEEN | EVANS   |
|----------------------------------|---------|-------------|---------|
| B40610 14 cm - 5 1/2"            | B406810 | 15 cm - 6"  | B406910 |
| B40620 16 cm - 6 1/4"            | B406811 | 23 cm - 9"  | B406911 |
| B40640 18 cm - 7"                | B406812 | 25 cm - 10" | B406912 |
| B40650 20 cm - 8"                | B406813 |             |         |
| B40660 25 cm - 10"               | B406814 |             |         |
| B40670 30 cm - 11 3/4"           | B406815 |             |         |



1 x 2 griffes  
1 x 2 teeth  
1 x 2 dientes


  
B40640  
18 cm - 7"


  
B406812  
18 cm - 7"


  
B406911  
23 cm - 9"


  
B407900  
25 cm - 9 3/4"

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

II - 45

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                            | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B406911   | PINCE DISSECTION WANGENSTEEN L:230MM DROITE MORS<br>TUNGSTENE | 3661219334187                                                                                          |
|           | WANGENSTEEN DISSECTING FORCEPS L:230MM STRAIGHT<br>TUNGSTEN   | <br>3 661219 334187 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE + TUNGSTENE / STAINLESS STEEL + TUNGSTEN

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021) + TUNGSTENE

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-045

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*