

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                 | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B408821   | PINCE MICRO TUBAIRE AUSTIN L:180MM DROITE   | 3661219334385                                                                                          |
|           | AUSTIN MICRO TUBAL FORCEPS L:180MM STRAIGHT | <br>3 661219 334385 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

02-033

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Pinces à dissection délicates - Delicate dissecting forceps - Pinzas para disección delicadas

| VISE                                   |                           | OSCHNER | AUSTIN                               |
|----------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| Droite<br>Straight<br>Recta            | Courbe<br>Curved<br>Curva |         |                                      |
| 12 cm - 4 <sup>3/4"</sup><br>B408801   | -                         |         | 14 cm - 5 <sup>1/2"</sup><br>B408820 |
| 13,5 cm - 5 <sup>1/4"</sup><br>B408802 | B408804                   |         | 18 cm - 7"<br>B408821                |

MICRO-PINCE À SUTURE 0,3 MM  
SUTURE MICRO FORCEPS 0,3 MM  
MICRO PINZA PARA SUTURA 0,3 MM



B408802 B408804  
13,5 cm - 5<sup>1/4"</sup> 13,5 cm - 5<sup>1/4"</sup>

PINCE À LIGATURE  
LIGATURE FORCEPS  
PINZA PARA HILO



B408810  
14,5 cm - 5<sup>3/4"</sup>

PINCE MICRO-TUBAIRE  
MICRO-TUBAL FORCEPS  
PINZA MICROTUBARICA



B408821  
18 cm - 7"

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

II - 33

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>          | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B408821   | PINCE MICRO TUBAIRE AUSTIN L:180MM DROITE   | 3661219334385                                                                                          |
|           | AUSTIN MICRO TUBAL FORCEPS L:180MM STRAIGHT | <br>3 661219 334385 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-033

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*