

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                | CODE EAN                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B50200    | PINCE KOCHER DROITE L:140MM A GRIFFES      | 3661219007630                                                                       |
|           | KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:140MM WITH TEETH |  |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

04-010

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

IV - Pinces  
II' - Forceps  
II' - Pinzas

LANDANGER

Pinces hémostatiques - Haemostatic forceps - Pinzas hemostáticas

KOCHER

Droite  
Straight  
Recta

| Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                             |                | A griffes<br>With teeth<br>Con dientes |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|  B50202 | 14 cm - 5 1/2" | B50200                                 |
| B50207                                                                                   | 15 cm - 6"     | B50205                                 |
| B50212                                                                                   | 16 cm - 6 1/4" | B50210                                 |
| B50217                                                                                   | 18 cm - 7"     | B50215                                 |
| B50225                                                                                   | 21 cm - 8 1/4" | B50220                                 |
| B50231                                                                                   | 24 cm - 9 1/2" | B50230                                 |

Mors courts - Short jaws - Boca corta

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| B50274 | 15 cm - 6" | B50272 |
|--------|------------|--------|



B50202  
14 cm - 5 1/2"



B50274  
15 cm - 6"

Mors courts - Short jaws - Boca corta



B50207  
15 cm - 6"



B50212  
16 cm - 6 1/4"



B50217  
18 cm - 7"



B50225  
21 cm - 8 1/4"



B50231  
24 cm - 9 1/2"



1/1

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER SA – Rue Renée et Louis Landanger - Z.I. La Vendue - CS 52152 - 52906 CHAUMONT Cedex 9  
Téléphone / Phone +33 (0)3 25 02 10 10 Télécopie / Fax +33 (0)3 25 02 10 20

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>         | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B50200    | PINCE KOCHER DROITE L:140MM A GRIFFES      | 3661219007630                                                                                          |
|           | KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:140MM WITH TEETH | <br>3 661219 007630 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62468

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

04-010

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*