

|           |                                                    |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br>PRODUCT TECHNICAL SHEET | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS              | CODE EAN                                                                            |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B50240    | PINCE KOCHER COURBE L:150MM A GRIFFES    | 3661219007777                                                                       |
|           | KOCHER CURVED FORCEPS L:150MM WITH TEETH |  |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

04-011

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Pinces hémostatiques - Haemostatic forceps - Pinzas hemostáticas

| KOCHER                                                                                   |                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | Courbe<br>Curved<br>Curva |                                        |
| Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                             |                           | A griffes<br>With teeth<br>Con dientes |
|  B50236 | 14 cm - 5 1/2"            | B50235                                 |
| B50242                                                                                   | 15 cm - 6"                | B50240                                 |
| B50247                                                                                   | 16 cm - 6 1/4"            | B50245                                 |
| B50252                                                                                   | 18 cm - 7"                | B50250                                 |
| B50257                                                                                   | 21 cm - 8 1/4"            | B50255                                 |
| B50267                                                                                   | 24 cm - 9 1/2"            | B50265                                 |

  

Mors courts - Short jaws - Boca corta

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| B50278 | 15 cm - 6" | B50276 |
|--------|------------|--------|



**B50236**  
14 cm - 5 1/2"



**B50278**  
15 cm - 6"

Mors courts - Short jaws - Boca corta



**B50242**  
15 cm - 6"



**B50247**  
16 cm - 6 1/4"



**B50252**  
18 cm - 7"



**B50257**  
21 cm - 8 1/4"



**B50267**  
24 cm - 9 1/2"

IV - 11

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



1/1

IV - Pinces  
IV - Forceps  
IV - Pinzas

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B50240    | PINCE KOCHER COURBE L:150MM A GRIFFES    | 3661219007777                                                                                          |
|           | KOCHER CURVED FORCEPS L:150MM WITH TEETH | <br>3 661219 007777 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62468

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

04-011

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*