

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B50274	PINCE KOCHER DROITE L:150MM MORS COURTS SANS GRIFFES	3661219007883
	KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:150MM WITHOUT TEETH SHORT JAWS	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

04-010

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

IV - Pincas
II' - Forceps
II' - Pinzas

L A N D A N G E R

Pincas hémostatiques - Haemostatic forceps - Pinzas hemostáticas

KOCHER

Sans griffes
Without teeth
Sin dientes

B50202	14 cm - 5 1/2"
B50207	15 cm - 6"
B50212	16 cm - 6 1/4"
B50217	18 cm - 7"
B50225	21 cm - 8 1/4"
B50231	24 cm - 9 1/2"

Droite
Straight
Recta

A griffes
With teeth
Con dientes

B50200	
B50205	
B50210	
B50215	
B50220	
B50230	

Mors courts - Short jaws - Boca corta

B50274	15 cm - 6"	B50272
---------------	------------	---------------



B50202
14 cm - 5 1/2"



B50274
15 cm - 6"

Mors courts - Short jaws - Boca corta



B50207
15 cm - 6"



B50212
16 cm - 6 1/4"



B50217
18 cm - 7"



B50225
21 cm - 8 1/4"



B50231
24 cm - 9 1/2"



Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

IV - 10

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B50274	PINCE KOCHER DROITE L:150MM MORS COURTS SANS GRIFFES	3661219007883
	KOCHER STRAIGHT FORCEPS L:150MM WITHOUT TEETH SHORT JAWS	 3 661219 007883

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

62468

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

04-010

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).