

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE     | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                | CODE EAN                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B50615</b> | PINCE KELLY COURBE L:140MM SANS GRIFFES    | 3661219008378                                                                                          |
|               | KELLY FORCEPS CURVED WITHOUT TEETH L:140MM | <br>3 661219 008378 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page


04-031

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION


**L A N D A N G E R**

Pinces hémostatiques - Haemostatic forceps - Pinzas hemostáticas

| Droite<br>Straight<br>Recta            |                                                                                            |                | Courbe<br>Curved<br>Curva              |                                                                                              |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A griffes<br>With teeth<br>Con dientes | Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                               |                | A griffes<br>With teeth<br>Con dientes | Sans griffes<br>Without teeth<br>Sin dientes                                                 |  |
| B50555                                 | B50575  | 14 cm - 5 1/2" | B50595                                 | B50615  |  |
| B50560                                 | B50580                                                                                     | 16 cm - 6 1/4" | B50600                                 | B50620                                                                                       |  |
| B50565                                 | B50585                                                                                     | 18 cm - 7"     | B50605                                 | B50625                                                                                       |  |
| B50570                                 | B50590                                                                                     | 21 cm - 8 1/4" | B50610                                 | B50630                                                                                       |  |

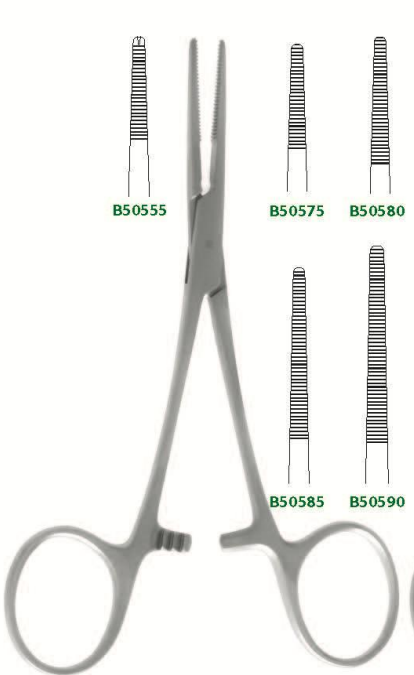

**B50575**  
14 cm - 5 1/2"

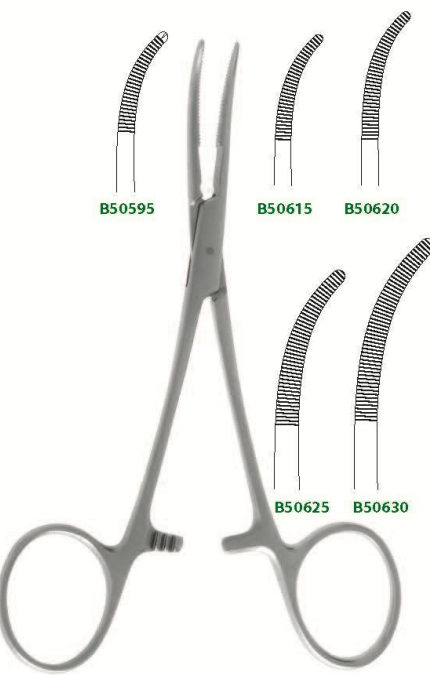

**B50615**  
14 cm - 5 1/2"

IV - Pinces  
IV - Forceps  
IV - Pinzas

**IV - 31**

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015



|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>         | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B50615    | PINCE KELLY COURBE L:140MM SANS GRIFFES    | 3661219008378                                                                                          |
|           | KELLY FORCEPS CURVED WITHOUT TEETH L:140MM | <br>3 661219 008378 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62468

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

04-031

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*