

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B80700	ECARTEUR RICARD-BEGOIN AVEC COMPAS DEMONTABLE ET 3 VALVES DE 120MM (2 LATERALES + 1 MEDIANE)	3661219013150
	RICARD-BEGOIN RETRACTOR WITH REMOVABLE COMPASS AND 3 BLADES 120MM (2 LATERAL AND 1 CENTRAL)	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015


Chapitre-page

07-075

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Écarteurs - Retractors - Separadores

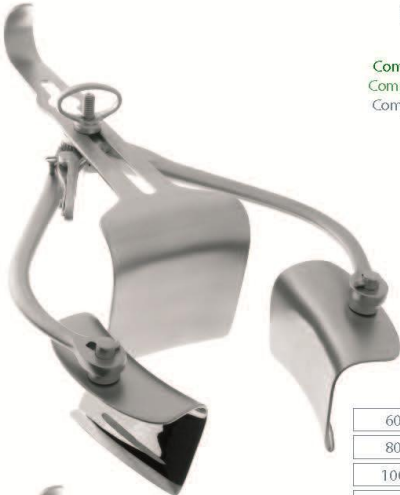

RICARD

Complet avec 3 valves
Complete with 3 blades
Completo con 3 valvas

B80620
60 mm



RICARD-BEGOIN

B80685
60 mm

L			
60 mm		B80620	= B80640 + 2 x B80645 + B80665
80 mm		B80625	= B80640 + 2 x B80650 + B80670
100 mm		B80630	= B80640 + 2 x B80655 + B80675
120 mm		B80635	= B80640 + 2 x B80660 + B80680

L			
60 mm		B80685	= B80640 + 2 x B80705 + B80725
80 mm		B80690	= B80640 + 2 x B80710 + B80730
100 mm		B80695	= B80640 + 2 x B80715 + B80735
120 mm		B80700	= B80640 + 2 x B80720 + B80740

O : Ouverture - Blades opening - Abertura de las hojas
P : Profondeur - Depth - Profundidad
L : Largeur - Width - Anchura

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

2/5

VII - Écarteurs
VII - Retractors
VII - Separadores

VII - 75

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B80700	ECARTEUR RICARD-BEGOIN AVEC COMPAS DEMONTABLE ET 3 VALVES DE 120MM (2 LATERALES + 1 MEDIANE)	3661219013150
	RICARD-BEGOIN RETRACTOR WITH REMOVABLE COMPASS AND 3 BLADES 120MM (2 LATERAL AND 1 CENTRAL)	 3 661219 013150

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

45182

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X20Cr13(1.4021) + X2CrNi19-11(1.4306)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

07-075

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).