

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B809022	JEU DE 2 PAIRES DE VALVES POUR ECARTEUR A RACHIS 'NOGENT' 50X12MM	3661219013921
	SET OF 4 BLADES FOR NOGENT RACHIS RETRACTOR 50X12MM	

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

07-104

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

LANDANGER

Écarteurs - Retractors - Separadores

RACHIS NOGENT


Complet avec 6 paires de valves
Complete with 6 pairs of blades
Completo con 6 pares de valvas

O

 **B809020** 180 mm

Valves seules (2 paires)
Blades only (2 pairs)
Valvas sólo (2 pares)

	P	L
 B809021	40 mm	12 mm
 B809022	50 mm	12 mm
 B809023	65 mm	12 mm

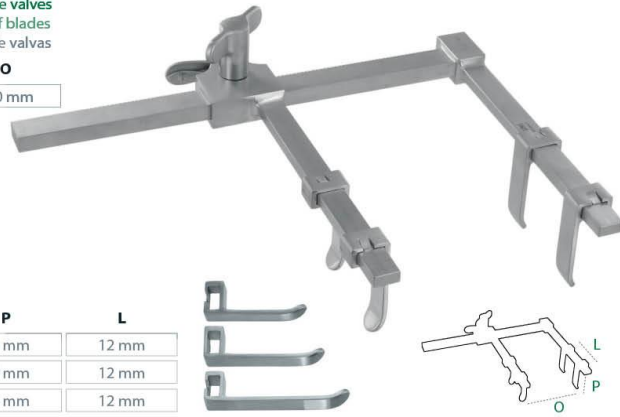

CHANDLER

Complet avec 3 paires de valves
Complete with 3 pairs of blades
Completo con 3 pares de valvas

O

 **B809030** 100 mm

Valves seules (paires)
Blades only (pairs)
Valvas sólo (pares)

	P	L
 B809031	40 mm	15 mm
 B809032	55 mm	24 mm
 B809033	65 mm	24 mm
 B809034	85 mm	24 mm
 B809035	100 mm	24 mm



O : Ouverture - Blades opening - Abertura de las hojas
P : Profondeur - Depth - Profundidad
L : Largeur - Width - Anchura

VII - 104

 1/2

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B809022	JEU DE 2 PAIRES DE VALVES POUR ECARTEUR A RACHIS 'NOGENT' 50X12MM	3661219013921
	SET OF 4 BLADES FOR NOGENT RACHIS RETRACTOR 50X12MM	 3 661219 013921

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

46774

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

07-104

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*