

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
B817020	VALVE LATÉRALE COLLIN 38X60MM (L'UNITÉ)	3661219338642
	COLLIN LATERAL BLADE 38X60MM (UNIT)	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

07-079


DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

L A N D A N G E R

Écarteurs - Retractors - Separadores

COLLIN

Valves latérales (à l'unité)
Lateral blades (per unit)
Valvas laterales (la unidad)

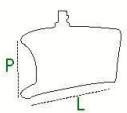


	P	L
 B817020	38 mm	60 mm
 B817021	38 mm	80 mm
 B817022	38 mm	100 mm

Valve médiane
Center blade
Valva mediana



	P	L
 B817030	55 mm	55 mm
 B817031	55 mm	75 mm

Compas seul
Compass only
Compas sólo



B817010
21 cm - 8 1/2"



Complet avec 2 valves latérales et 1 valve médiane
Complete with 2 lateral blades and 1 center blade
Completo con 2 valvas laterales y 1 valva mediana

 B817000	= B817010 + 2 x B817020 + B817030
 B817001	= B817010 + 2 x B817021
 B817002	= B817010 + 2 x B817022 + B817031

 1/2

O : Ouverture - Blades opening - Abertura de las hojas
P : Profondeur - Depth - Profundidad
L : Largeur - Width - Anchura

VII - 79

VII - Écarteurs
VII - Retractors
VII - Separadores

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
B817020	VALVE LATÉRALE COLLIN 38X60MM (L'UNITÉ)	3661219338642
	COLLIN LATERAL BLADE 38X60MM (UNIT)	 3 661219 338642

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

46774

CE Class :

GMDN code :

PERFORMANCES REVENDIQUÉES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

Operating room medical device :

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Material type :

Nuance matière :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

Material grade :

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

Outer dimensions :

See products description

Chapitre-pages

07-079

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

Packaging :

Polyethylene plastic pouch (PE).