

|                   |                                                                  |                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br><b>Indice : 2</b><br><b>Date : 01/06/2018</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                                                                | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C010002   | CROCHET A PHLEBECTOMIE DU DR MULLER PTE FINE RECOURBEE DROITIER N° 2 L:150MM MODELE LEPINE | 3661219291817                                                                                          |
|           | DR MULLER PHLEBECTOMY HOOK - FINE POINT CURVED RIGHT-HANDED N° 2 L:150MM - LEPINE MODEL    | <br>3 661219 291817 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

05-007

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

**L A N D A N G E R**

Phlébectomie - Phlebectomy - Flebectomía

**TULIPE**



1.00  
C012000  
12 cm - 4 3/4"

1.25  
C012001  
12 cm - 4 3/4"

1.50  
C012002  
12 cm - 4 3/4"


1.75  
C012003  
12 cm - 4 3/4"

2.00  
C012004  
13 cm - 5"

**MULLER**

Crochets à phlébectomie - Phlebectomy hooks - Ganchos para flebectomía

| N°   | Code    | Dimensions |
|------|---------|------------|
| N° 1 | C010106 | 15 cm - 6" |
| N° 2 | C010206 | 15 cm - 6" |
| N° 3 | C010306 | 15 cm - 6" |
| N° 4 | C010406 | 15 cm - 6" |

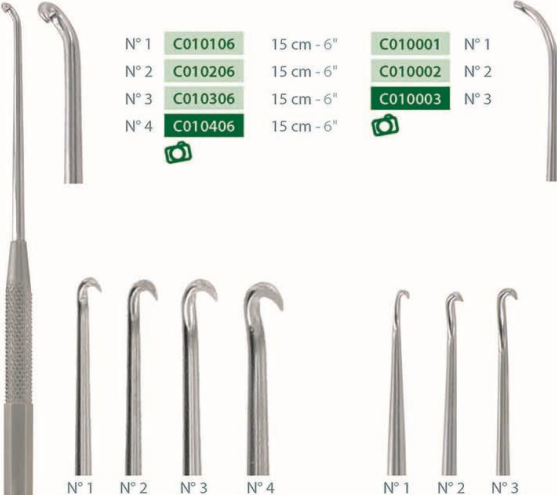

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4

N° 1 N° 2 N° 3

Modèle Lepine  
Lepine model  
Modelo Lepine



**RUMEL BELMONT**

TOURNIQUET VASCULAIRE  
VASCULAR TOURNIQUET  
TOURNIQUETE VASCULAR

C09150  
32 cm - 12 1/2"

Mandrin seul  
Single pad  
Mandril único

C091510  
26 cm - 11"

V-Clamps  
V-Clamps  
V-Clamps

**V - 7**

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                                                            | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C010002   | CROCHET A PHLEBECTOMIE DU DR MULLER PTE FINE<br>RECOURBEE DROITIER N° 2 L:150MM MODELE LEPINE | 3661219291817                                                                                          |
|           | DR MULLER PHLEBECTOMY HOOK - FINE POINT CURVED RIGHT-<br>HANDED N° 2 L:150MM - LEPINE MODEL   | <br>3 661219 291817 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :

I

Code GMDN :

46768

*CE Class :*

*GMDN code :*

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :

REUTILISABLE/REUSABLE

*Operating room medical device :*

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

*Material type :*

Nuance matière :

X30Cr13(1.4028) + X2CrNi19-11(1.4306)

*Material grade :*

Dimensions :

Voir désignations produits

Landanger 2015

*Outer dimensions :*

*See products description*

Chapitre-pages

05-007

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.

*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :

Pochette plastique en polyéthylène (PE).

*Packaging :*

*Polyethylene plastic pouch (PE).*