

|                   |                                                                  |                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | <b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b><br><b>PRODUCT TECHNICAL SHEET</b> | <b>FAQ 026 INFO</b><br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10043    | PINCE DISSECTION DEBAKEY DROITE 2.7MM L:240MM     | 3661219017158                                                                                          |
|           | DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.7MM L:240MM | <br>3 661219 017158 |

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

02-042

### DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

II - Dissection  
II - Dissection  
II - Dissection

## L A N D A N G E R

Pinces à dissection vasculaires - Vascular dissecting forceps - Pinzas para disección vasculares

| DEBAKEY |                 |  |        | COOLEY |  |
|---------|-----------------|--|--------|--------|--|
| 2,7 mm  |                 |  | 3,5 mm |        |  |
| C10041  | 16 cm - 6 1/4"  |  | C10045 |        |  |
| C10042  | 20 cm - 8"      |  | C10050 |        |  |
| C10043  | 24 cm - 9 1/2"  |  | C10055 |        |  |
| C10044  | 30 cm - 11 3/4" |  | C10057 |        |  |



**C10041**  
16 cm - 6 1/4"



**C10042**  
20 cm - 8"



**C10045**  
16 cm - 6 1/4"



**C10050**  
20 cm - 8"



**C10770**  
20 cm - 8"

II - 42

 4/5  
Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10043    | PINCE DISSECTION DEBAKEY DROITE 2.7MM L:240MM     | 3661219017158                                                                                          |
|           | DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.7MM L:240MM | <br>3 661219 017158 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-042

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement :  
*Packaging :*

Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Polyethylene plastic pouch (PE).*