

|                   |                                                           |                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| L A N D A N G E R | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

1

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C100580   | PINCE DISSECTION DEBAKEY GERALD L:150MM DROITE 1.2MM     | 3661219339281                                                                                          |
|           | DEBAKEY GERALD DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 1.2MM L:150MM | <br>3 661219 339281 |

Catalogues / *catalogs*

Landanger 2015

Chapitre-page

02-043

## DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Pinces à dissection vasculaires - Vascular dissecting forceps - Pinzas para disección vasculares

| DEBAKEY GERALD                                                                                                                                              | DEBAKEY DIETRICH                                                                                                                                                 | DEBAKEY                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1,2 mm<br>15 cm - 6"<br>18 cm - 7"<br><b>C100580</b><br><b>C100581</b> | 1,5 mm<br>16 cm - 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>20 cm - 8"<br>24 cm - 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br><b>C100582</b><br><b>C100583</b><br><b>C100584</b> | 1,2 mm<br>15 cm - 6"<br>1,5 mm<br>20 cm - 8"<br>24 cm - 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>30 cm - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br><b>C100590</b><br><b>C100595</b><br><b>C100596</b><br><b>C100597</b> |



**C100580**  
15 cm - 6"



**C100582**  
16 cm - 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**C100590**  
15 cm - 6"



**C100595**  
20 cm - 8"

II - 43

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

4/5

|           |                                                           |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LANDANGER | FICHE TECHNIQUE PRODUIT<br><i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i> | FAQ 026 INFO<br>Indice : 2<br>Date : 01/06/2018 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

| REFERENCE | DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>                       | CODE EAN                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C100580   | PINCE DISSECTION DEBAKEY GERALD L:150MM DROITE 1.2MM     | 3661219339281                                                                                          |
|           | DEBAKEY GERALD DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 1.2MM L:150MM | <br>3 661219 339281 |

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :  
*CE Class :*

I

Code GMDN :  
*GMDN code :*

62466

### PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :  
*Operating room medical device :*

REUTILISABLE/REUSABLE

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :  
*Material type :*

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :  
*Material grade :*

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits  
*Outer dimensions :* *See products description*  
Chapitre-pages

Landanger 2015

02-043

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.  
*Cleaning / Pre-disinfection :* *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

| Méthode de stérilisation à la vapeur saturée | Température     | Durée      | Temps de séchage | Pression absolue            |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pré-vide                                     | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes       | 2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |
| Pré-vide                                     | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes       | 3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi |

*Sterilization process :*

*The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.*

| Saturated steam sterilization method | Temperature     | Time       | Drying time | Absolute pressure          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|
| Pre-vacuum                           | 132 °C (270 °F) | 4 minutes  | 30 minutes  | 2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 3 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 5 minutes  | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |
| Pre-vacuum                           | 134 °C (273 °F) | 18 minutes | 35 minutes  | 3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi |

### EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).  
*Packaging :* *Polyethylene plastic pouch (PE).*