

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	--	---

Éditée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - DESCRIPTIONS	CODE EAN
C102001	CLAMP BULLDOG ORDINAIRE L:40MM COURBE FIN	3661219201342
	ORDINARY BULLDOG CLAMP L:40MM CURVED FINE	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

05-009

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ PRODUCT DESCRIPTION

LANDANGER

Clamps bulldog - Bulldog clamps - Clamp bulldog

Droit Straight Recto	STANDARD STANDARD	Courbe Curve Curvo	Droit Straight Recto	FIN FINE FINO	Courbe Curve Curvo
C10170	3,5 cm - 1 1/2"	C10195	C101701	3,5 cm - 1 1/2"	C101951
C10175	4 cm - 1 1/2"	C10200	C101751	4 cm - 1 1/2"	C102001
C10180	5 cm - 2"	C10205	C101801	5 cm - 2"	C102051
 C10185	6 cm - 2 1/4"	 C10210	 C101851	6,5 cm - 2 1/2"	 C102101
C10190	7 cm - 2 3/4"	C10215	C101901	7 cm - 2 3/4"	C102151


C10185
 6 cm - 2 1/4"


C10210
 6 cm - 2 1/4"


C101851
 6,5 cm - 2 1/2"

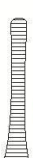

C102101
 6,5 cm - 2 1/2"

CARREL

CLAMP POUR LYMPHOGRAPHIE
LYMPHOGRAPHIA CLAMP
CLAMP PARA LINFOGRAFÍA

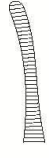

C10220
 5 cm - 2"


C102304
 6,3 cm - 2 1/2"


C102304

JOHNS HOPKINS

Droit Straight Recto		Courbe Curve Curvo
C102301	3,8 cm - 1 1/2"	C102401
C102302	5,1 cm - 2"	C102402
C102303	5,7 cm - 2 1/4"	C102403
 C102304	6,3 cm - 2 1/2"	C102404
C102305	7,0 cm - 2 3/4"	C102405
C102306	7,5 cm - 3"	C102406
C102307	9,0 cm - 3 1/2"	C102407


C102404

V - Clamps
V - Clamps
V - Clamps

V - 9

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
C102001	CLAMP BULLDOG ORDINAIRE L:40MM COURBE FIN	3661219201342
	ORDINARY BULLDOG CLAMP L:40MM CURVED FINE	 3 661219 201342

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

62470

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : *See products description*
Chapitre-pages

Landanger 2015

05-009

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : *Standard conditions for reusable surgical instruments*

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : *Polyethylene plastic pouch (PE).*