

L A N D A N G E R	FICHE TECHNIQUE PRODUIT PRODUCT TECHNICAL SHEET	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-------------------	--	--

Editée le / Publishing date

2022-04-28

Page

1

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
C120190	DILATATEUR VASCULAIRE DEBAKEY L:350MM D:9.0MM	3661219340058
	DEBAKEY VASCULAR DILATOR L:350MM D:9,0MM	

Catalogues / catalogs

Landanger 2015

Chapitre-page

05-040

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF/ *PRODUCT DESCRIPTION*

L A N D A N G E R

Dilatateurs vasculaires et aortiques - Aortic and vascular dilators - Dilatadores vasculares y de aorta

DEBAKEY		COOLEY	
19 cm - 7 1/2"	35 cm - 14"	13 cm - 5"	
C120005 Ø 0,5 mm	-	Ø 0,5 mm C120205	
C120010 Ø 1,0 mm	C120110	Ø 1,0 mm C120210	
C120015 Ø 1,5 mm	C120115	Ø 1,5 mm C120215	
C120020 Ø 2,0 mm	C120120	Ø 2,0 mm C120220	
C120025 Ø 2,5 mm	C120125	Ø 2,5 mm C120225 	
C120030 Ø 3,0 mm	C120130	Ø 3,0 mm C120230	
C120035 Ø 3,5 mm	C120135	Ø 4,0 mm C120240	
 C120040 Ø 4,0 mm	C120140	Ø 5,0 mm C120250	
C120045 Ø 4,5 mm	C120145		
C120050 Ø 5,0 mm	C120150		
C120070 Ø 7,0 mm	C120170		
C120090 Ø 9,0 mm	C120190		



C120040
19 cm - 7 1/2"

V - 40



TUBBS

C120300
16 cm - 6 1/4"



C120225
13 cm - 5 1/2"

V - Clamps
V - Clamps
V - Clamps

Copyright © LANDANGER - 2009 - 2015

LANDANGER	FICHE TECHNIQUE PRODUIT <i>PRODUCT TECHNICAL SHEET</i>	FAQ 026 INFO Indice : 2 Date : 01/06/2018
-----------	---	---

Éditée le / *Publishing date*

2022-04-28

Page

2

REFERENCE	DESIGNATIONS - <i>DESCRIPTIONS</i>	CODE EAN
C120190	DILATATEUR VASCULAIRE DEBAKEY L:350MM D:9.0MM	3661219340058
	DEBAKEY VASCULAR DILATOR L:350MM D:9,0MM	 3 661219 340058

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES / *REGULATORY INFORMATION*

Classe CE :
CE Class :

I

Code GMDN :
GMDN code :

11268

PERFORMANCES REVENDIQUEES / *INTENDED PERFORMANCE*

Dispositif médical de bloc opératoire :
Operating room medical device :

REUTILISABLE/REUSABLE

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUE / *SPECIFIC FEATURES*

Type matière :
Material type :

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

Nuance matière :
Material grade :

X20Cr13(1.4021)

Dimensions : Voir désignations produits
Outer dimensions : See products description
Chapitre-pages

Landanger 2015

05-040

Nettoyage/Pré-désinfection : Standard pour instrumentation de bloc opératoire réutilisable.
Cleaning / Pre-disinfection : Standard conditions for reusable surgical instruments

Stérilisation :

La stérilisation doit être effectuée selon un procédé de stérilisation à la vapeur conformément à la norme ISO 17665-1 (procédé sous vide fractionné) avec un stérilisateur conformément à la norme EN 285.

Méthode de stérilisation à la vapeur saturée	Température	Durée	Temps de séchage	Pression absolue
Pré-vide	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2,9 bars, 2,8 atm, 41,6 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi
Pré-vide	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3,0 bars, 3,0 atm, 44,1 psi

Sterilization process :

The Sterilization shall be performed according to ISO 17665-1 validated steam sterilisation procedure (fractional vacuum procedure) in an autoclave in compliance with EN 285.

Saturated steam sterilization method	Temperature	Time	Drying time	Absolute pressure
Pre-vacuum	132 °C (270 °F)	4 minutes	30 minutes	2.9 bar, 2.8 atm, 41.6 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	3 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	5 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi
Pre-vacuum	134 °C (273 °F)	18 minutes	35 minutes	3.0 bar, 3.0 atm, 44.1 psi

EMBALLAGE / *PACKAGING*

Conditionnement : Pochette plastique en polyéthylène (PE).
Packaging : Polyethylene plastic pouch (PE).